



BREATHALYSER FULL MANUAL

PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru!
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania by
zakupione urządzenie służyło jak najlepiej.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

wskazania	0,00 ~ 2,00 ‰
dokładność	+/- 0,10‰ przy 0,5 ‰ w 25°C
sensor	półprzewodnikowy
zasilanie	dwie baterie alkaliczne AA 1.5V
wymiary (sz/wys/gł)	44 x 123 x 19 mm
waga	50g bez baterii
kalibracja	co 6 miesięcy lub co 400 pomiarów
wymagany ustnik	tak
inne	samokontrola działania sensora kontrola poziomu naładowania baterii kontrola przepływu powietrza kolorowa dioda LED

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY


Włóż baterie do urządzenia zgodnie z polaryzacją [**UWAGA - używaj wyłącznie baterii alkalicznych!!!**].

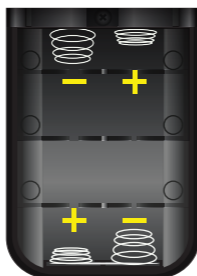


UWAGA!

Wiele czynników może zakłócać wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, różne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stąd wyniki prezentowane przez alkomat są jedynie wynikami szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność wyników oraz za ew. szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem alkomatu. Urządzenie nie jest alkomatem dowodowym.

W celu osiągnięcia maksymalnej wiarygodności zachowaj 1-2 minutowy odstęp między ewentualnymi kolejnymi badaniami.

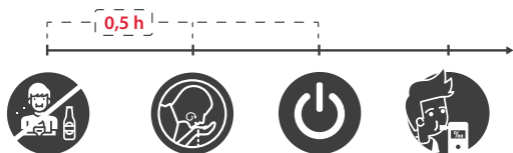

Stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia się w czasie. Najpierw rośnie podczas wchłaniania alkoholu do krwi, następnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez organizm. Najważniejszą informacją jaką ma wskazać alkomat jest to w której fazie się znajdujesz - wzrostu stężenia czy eliminacji alkoholu. Chcąc uzyskać wiarygodny wynik dokonuj pomiarów kiedy nie zamierzasz już spożywać alkoholu. Sugerujemy wykonać **min. 3 pomiary w równych 30 minutowych odstępach czasu i zapisywać poszczególne wyniki**. Porównanie tych wyników odpowie na pytanie, w której fazie się znajdujemy - za pomocą 3 malejących wyników dokonanych w równych odstępach czasu możemy oszacować kiedy organizm będzie oczyszczony z alkoholu.

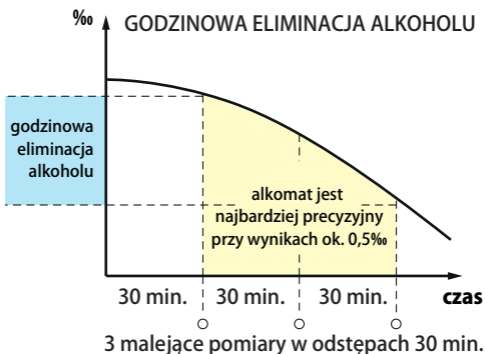

PRZECHOWYWANIE I UWAGI OGÓLNE

Nie jeść, nie pić i nie palić przez 30 minut przed wykonaniem pomiaru.



Przechowywać w suchym miejscu, unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne (np. „podszybie” samochodu) i temperatur spoza zakresu 0-40 °C.



Nie wykonywać pomiaru bezpośrednio po spożyciu alkoholu. Dmuchiwanie w alkomat bezpośrednio po spożyciu alkoholu może spowodować uszkodzenie czujnika i nieprawidłowe pomiary.



Nie przechowywać alkomatu w pobliżu lotnych substancji w tym alkoholu. Nie wdychać płynów i dymów do czujnika oraz nie zanurzać urządzenia w płynach. Nie należy czyścić urządzenia z użyciem detergentów.



Serwisować urządzenie zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.



**NIESTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ
MOŻE SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE URZĄDZENIA ORAZ UTRATĘ
GWARANCJI**

UWAGA

Kalibracja to pojęcie nierozdzielnie związane z KAŻDYM ALKOMATEM.

Oznacza to, że co określony w specyfikacji czas / ilość pomiarów alkomat należy ponownie skonfigurować by poprawnie interpretował wskazania zużywającego się czujnika. O konieczności kalibracji świadczą odpowiednie komunikaty oraz wyniki zdecydowanie odbiegające od rzeczywistości - np. 0,5‰ mimo braku spożycia alkoholu.

Konieczność kalibracji nie jest wadą alkomatu i nie podlega reklamacji.

Proszę nie oczekiwać, że niekalibrowany regularnie alkomat będzie wskazywał poprawne wyniki. Kalibracje po upływie okresu gwarancyjnego są płatne i można ich dokonywać w siedzibie **PROMILER** oraz **SPEED-UP** (również wysyłkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatów.

Dodatkowe informacje znajdują się w osobnej, załączonej do produktu Karcie Gwarancyjnej.



Kalibrację w tym modelu należy wykonywać **co 400 pomiarów** lub **co 6 miesięcy** (niezależnie od ilości wykonanych pomiarów). Regularna kalibracja jest konieczna do utrzymania poprawnego działania urządzenia oraz przedłużenia żywotności sensora.



Uwaga - kalibracja tego alkomatu w okresie **12 m-cy od daty zakupu** jest **BEZPŁATNA** w siedzibie **Promiler, Speed-UP** i innych autoryzowanych punktach serwisowych.



CENTRALA

SPEED-UP S.C. A. Skwarek, M. Witczak
ul. Głgowska 277
60-104 Poznań
tel/fax (+48 61) 8312345

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Pasaż Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa
tel/fax (+48 22) 3762544