


FOTEL MASUJĄCY iRest MAESTHRON A801-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

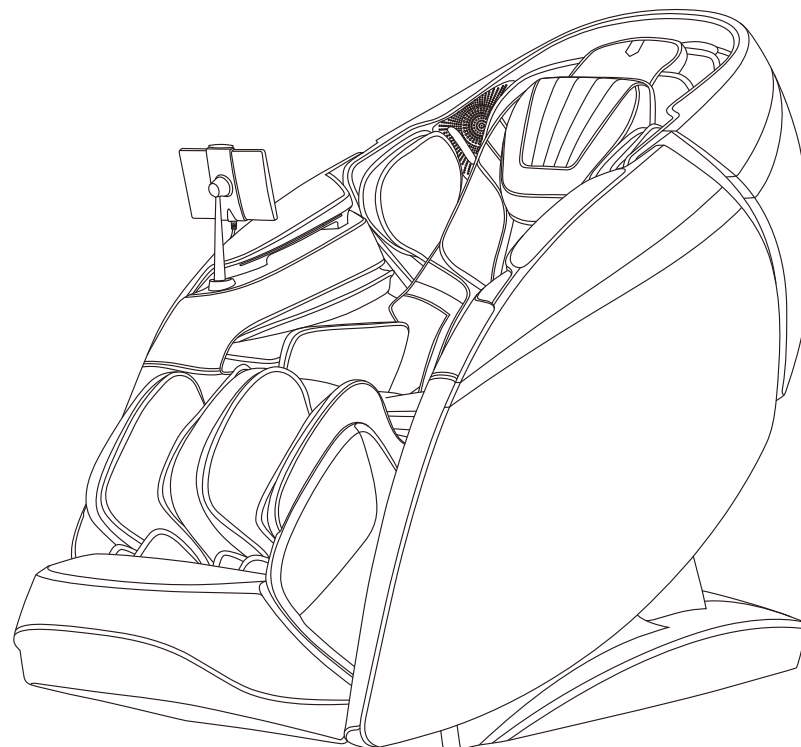

Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi, aby przed uruchomieniem fotela masującego dowiedzieć się, jak prawidłowo z niego korzystać. W szczególności prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz zasadami bezpiecznego użytkowania.

Uwaga: Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia i jego opisie. Jeśli istnieje jakaś różnica między funkcją urządzenia dostępnego na rynku a opisem w instrukcji, to wynika ona ze zwykłej aktualizacji urządzenia, a producent nie ma obowiązku informowania o tym fakcie. Kolor zilustrowany w instrukcji obsługi nie reprezentuje aktualnej kolorystyki fotela masującego.

SPIS TREŚCI

Przed pierwszym użyciem

Środki ostrożności -----	62-64
Elementy montażowe -----	65-67
Umieszczenie fotela masującego -----	68-69
Przed użyciem -----	70-71
Budowa urządzenia -----	72-78

Sposób użytkowania

Instrukcja obsługi -----	79-116
Zakończenie masażu -----	116

Konserwacja



Czyszczenie i konserwacja -----	117
---------------------------------	-----

Ważne

Rozwiązywanie problemów -----	118
Specyfikacja techniczna urządzenia -----	119


Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

- Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie istotne instrukcje.
- Zawarte tu wskazówki pomogą bezpiecznie i prawidłowo korzystać z urządzenia.
- Aby wyraźnie wskazać zakres możliwych urazów i uszkodzeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, informacje zostały opatrzone nagłówkiem "**Ostrzeżenie**" lub "**Uwaga**". Jedne i drugie są ważne dla bezpieczeństwa i należy ich przestrzegać.


 Ostrzeżenie	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użycia może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 Uwaga	Sygnalizuje, że w wyniku niewłaściwego użytkowania może dojść do niewielkich obrażeń lub uszkodzenia mienia.


- Należy zwrócić uwagę na symbol przed każdym elementem dotyczący bezpieczeństwa.


 Zabronione	Absolutny zakaz
---	-----------------

Zabrania się używania fotela przez poniższe osoby	
 Zabronione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniami fizycznymi, sensorycznymi lub neurologicznymi lub nieposiadające doświadczenia i zdrowego rozsądku, chyba że są one nadzorowane i poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniami. ■ Pacjenci z osteoporozą. ■ Pacjenci z chorobami serca lub posiadające elektroniczne urządzenia medyczne jak rozrusznik serca. ■ Osoby, które mają gorączkę. ■ Kobiety w ciąży lub kobiety w trakcie miesiączki. ■ Pacjenci, którzy są ranni lub cierpią na chorobę skóry. ■ Dzieci poniżej 14 roku życia lub osoby niezdolne do samodzielnego umyślowo bez nadzoru nie mogą korzystać z tego urządzenia. ■ Osoby, którym lekarze zalecili odpoczynek lub którzy źle się czują. ■ Osoby, których ciała są mokre, nie mogą używać tego produktu. ■ Urządzenie ma podgrzewaną powierzchnię. Osoby niewrażliwe na ciepło muszą zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. ■ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta/serwisanta, lub kogoś o podobnych uprawnieniach.


Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)


Ważne uwagi co do bezpieczeństwa	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nie pozwalaj dzieciom dotykać ruchomych części tego fotela masującego. ■ Używaj dobrze uziemionego zasilacza odpowiedniego dla tego produktu. ■ Wyciągnij wtyczkę po użyciu lub przed czyszczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia produktu. ■ Obsługuj fotel masujący zgodnie z instrukcją obsługi. ■ Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane. ■ Nie używaj fotela masującego na zewnątrz. ■ Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. ■ Nigdy nie używaj tego produktu do innych celów niż wymienione w niniejszym dokumencie. ■ Zaleca się każdorazowo 20 minut użytkowania. ■ Nie używaj fotela, jeśli pokrywa lub skóra jest zepsuta lub uszkodzona. ■ Nie upuszczaj niczego nad fotelem masującym. ■ Nie zasypiaj podczas korzystania z fotela masującego. ■ Nie używaj fotela masującego, jeśli jesteś nietrzeźwy lub źle się czujesz. ■ Nie korzystaj z masażu w ciągu godziny po posiłku. ■ Nie ustawiaj dużej siły masażu aby uniknąć obrażeń.


Środki ostrożności	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją tego produktu. ■ Nigdy nie używaj mokrej ręki do wyciągania wtyczki. ■ Nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza tego produktu, aby uniknąć porażenia prądem lub uszkodzenia produktu. ■ Nie ciągnij za przewód zasilający podczas podłączania lub odłączania. Nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem jest zakazane. ■ Nie uszkodz przewodu ani nie modyfikuj obwodu tego urządzenia. ■ Używaj suchej ściereczki do czyszczenia elementów elektrycznych, takich jak wyłącznik I wtyczka. ■ Nie siadaj na urządzeniu w stanie odcięcia zasilania, aby uniknąć obrażeń w przypadku nagłego powrotu napięcia. ■ Zaprzestań korzystania z urządzenia, gdy działa ono nieprawidłowo i natychmiast skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta. ■ Zaprzestań używania tego produktu w przypadku pogorszenia się samopoczucia i skonsultuj się z lekarzem.

Warunki przechowywania	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura w pomieszczeniu : od 5°C do 40°C. ■ Wilgotność względna od 20% do 80%, brak gazów powodujących korozję, dobrze wentylowane pomieszczenie.

Środki ostrożności (muszą być przestrzegane)

Serwis i konserwacja	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none">■ Ten produkt powinien być konserwowany wyłącznie przez centrum serwisowe wyznaczone przez producenta. Żaden użytkownik nie powinien go rozmontowywać ani konserwować bez pozwolenia.■ Nie zapomnij wyłączyć głównego wyłącznika zasilania po zakończeniu użytkowania. Nie używaj produktu, jeśli gniazdo zasilania poluzuje się.■ Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy zwinąć przewód zasilający produktu i przechowywać go w suchym i wolnym od kurzu miejscu.■ Nie przechowywać produktu w wysokiej temperaturze lub w pobliżu otwartego ognia. Unikać długotrwałego wystawiania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.■ Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nigdy nie używaj rozcieńczalnika, benzenu lub alkoholu.■ Elementy mechaniczne tego produktu są specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane, więc nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja.■ Nie używaj ostrych przedmiotów do klucia tego produktu.■ Nie należy toczyć ani ciągnąć urządzenia po nierównym podłożu. Przed przemieszczeniem należy go podnieść.■ Produkt powinien być używany w sposób przerywany. Nie używaj go w sposób ciągły przez dłuższy czas.



Środowisko użytkowania	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none">■ Nie używaj tego produktu w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności, takich jak łazienka.■ Należy natychmiast zaprzestać używania produktu w przypadku gwałtownej zmiany temperatury otoczenia.■ Nie używaj tego produktu w środowisku silnie zapyłonym lub żrącym.■ Nie używaj tego produktu na małej przestrzeni lub w miejscu bez dobrej wentylacji.

Rozwiązywanie zwykłych usterek	
 Ostrzeżenia	<ul style="list-style-type: none">■ Naturalnym jest odgłos pracujących siłowników w momencie używania fotela masującego.■ Jeśli sterownik nie działa normalnie, należy sprawdzić, czy wtyczka i gniazdo zasilania są prawidłowo podłączone i czy włącznik zasilania jest włączony.■ Jeśli znamionowy czas pracy dobiegnie końca, fotel automatycznie aktywuje przycisk wyłączania; Jeżeli fotel masujący używany jest bez przerwy przez długi czas, to w momencie osiągnięcia wysokiej temperatury nastąpi automatyczne wyłączenie. Należy odczekać co najmniej pół godziny, aby móc dalej korzystać z fotela masującego.



Części montażowe

Instrukcja montażu masażera tydek

1. Po włączeniu zasilania opuść ramę oparcia za pomocą pilota.
2. Umieść złącze wiązki przewodów i rurę powietrzną odpowiednio z boku ramy stalowej w położenie odpowiadające podłokietnikowi (Rysunek 1).
3. Podnieś podłokietnik z włożoną rurą powietrzną i przewodem i zamocuj wszystkie zaczepy na podłokietniku po obu stronach stalowej ramy (Rysunek 2).

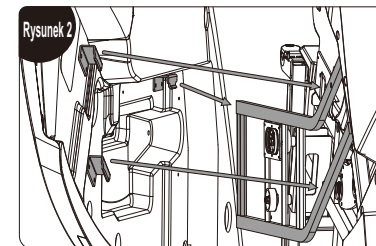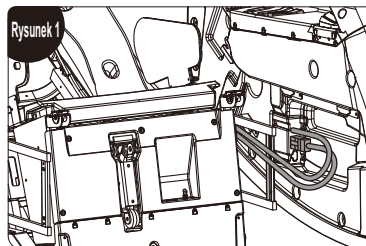




4. Umieść rolkę znajdującą się z tyłu podłokietnika do powierzchni mocowania podłokietnika (Rysunek 3) i opuść podłokietnik do tyłu i w dół. Następnie przesunąć podłokietnik do tyłu i na koniec zablokuj go dwiema śrubami M5 (Rysunek 4);

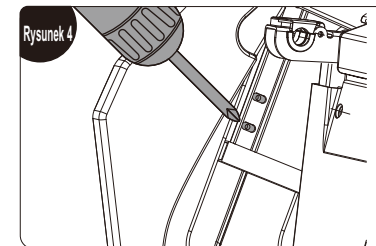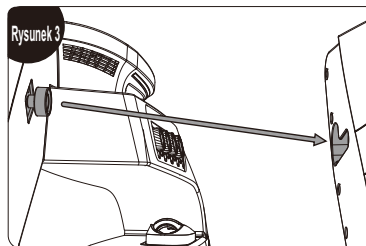

Części montażowe

Instrukcja montażu masażera łydek




1. Włóż przewody masażera łydek i rurę powietrzną do gniazd na przednim końcu stelaża (Rysunek 1).
2. Po zamontowaniu przewodu otwórz pokrywę mocującą masażer łydki po obu stronach stelaża (Rysunek 2).
3. Podnieś masażer i włóż go w szczelinę, zakryj pokrywę mocującą i na koniec przymocuj go za pomocą 2 śrub M4 (Rysunek 3).

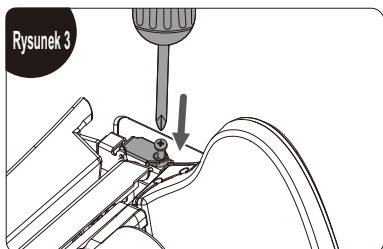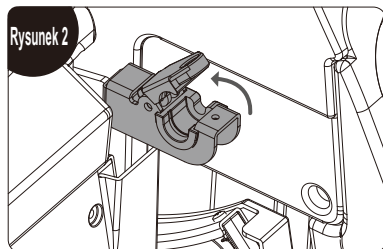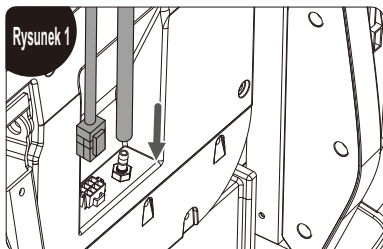

Części montażowe

Instrukcja montażu uchwyty ekranu dotykowego

1. Dopasuj uchwyt do otworu z przodu podłokietnika (po prawej stronie) i zamocuj go śrubami M5 (Rysunek 1).
2. Wyrównaj osłonę uchwyty z uchwytem i dociśnij wzdłuż pręta uchwyty do oporu. (Rysunek 2)
3. Po zamontowaniu całego uchwyty, lekko nim potrząśnij uchwytem, aby potwierdzić, że jest solidnie zamocowany. Instalacja uchwyty została zakończona. (Rysunek 3)

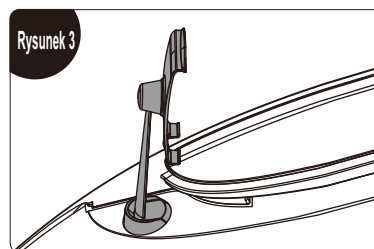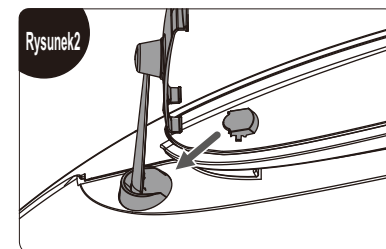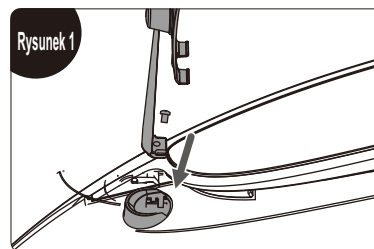


Umieszczenie fotela masującego

Miejsce montażu

Upewnij się, że jest wystarczająco dużo miejsca, ponieważ fotel masujący potrzebuje do rozłożenia co najmniej 10 cm.


Nie wystawiaj fotela masującego bezpośrednio na działanie wysokiej temperatury (np. przed urządzeniami grzewczymi) i promieni słonecznych; umieść go w miejscu, gdzie można uniknąć wysokiej temperatury i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Zaleca się ułożenie miękkiej maty w przypadku długotrwałego użytkowania w wyznaczonym miejscu. Podczas układania takiej maty, jej rozmiar powinien być wystarczający do objęcia podstawy urządzenia. Mieć na uwadze zakres, w którym urządzenie dotyka podłogi i miejsce, w którym stopy dotykają podłogi.

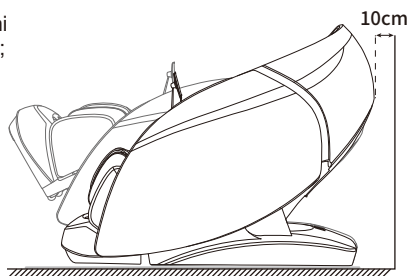

Podnoszenie fotela

Wymagana jest praca zespołowa przy podnoszeniu i przesuwniu fotela, aby uniknąć ryzyka obrażeń.

1. Podnieś fotel masujący, aby przenieść go na delikatnym podłożu, np. na drewnianych podłogach.
2. W przypadku przemieszczania urządzenia na drewnianej podłodze, zaleca się podniesienie go. Należy unikać uszkodzenia kółek. Gdy fotel jest podnoszony i przesuwany do wyznaczonej pozycji, należy uważać na ręce, aby uniknąć obrażeń, oraz uważać na przygnięcie stóp. Nie puszczaj urządzenia, dopóki korpus nie stanie całkowicie płasko na ziemi, podłoga może zostać uszkodzona, dlatego zaleca się umieszczenie na niej maty.

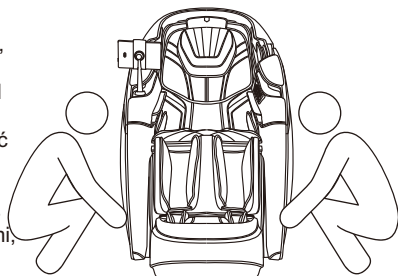


Umieszczenie fotela masującego

Metoda przemieszczania

Użyj tylnych kółek do przesuwania fotela masującego. Przesuń fotel, przechylając go do tyłu do około 45°, jak pokazano na rysunku.


UWAGA: Nadmierna siła przy wychylaniu spowoduje całkowite przewrócenie się fotela i uszkodzenie urządzenia.

1. Przed przemieszczeniem należy prawidłowo wyłączyć urządzenie, aby je zresetować i następnie odłączyć od zasilania.
2. Podczas przenoszenia na fotelu nie powinno nic leżeć. (Ludzie, zwierzęta domowe lub rzeczy).
3. Podczas przenoszenia nie należy upuszczać fotela z wysokości większej niż 2 mm ani przekraczać szczeliny większej niż 5 mm.
4. Podczas korzystania z kółek do przesunięcia urządzenia, pojedyncze pchnięcie nie jest zalecane; jeśli odległość przekracza 50 metrów, urządzenie należy przesuwać powoli i równomiernie.

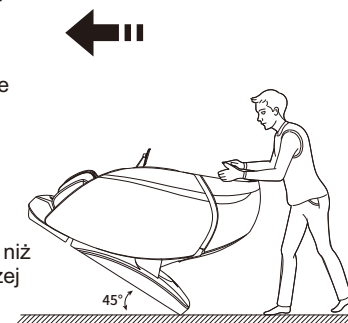

Jak zdemontować poduszkę zagłówek i poduszkę na oparcie oraz jak z nich korzystać

Zastosowanie poduszki zagłówek może zmniejszyć intensywność masażu ugniatającego na szyi i ramionach. O zastosowaniu poduszki zagłówek można zdecydować w zależności od potrzeb (zaleca się jej zastosowanie). Poduszka oparcia i oparcie są połączone zamkiem błyskawicznym (1), poduszka zagłówek i poduszka oparcia są również połączone zamkiem błyskawicznym (2).

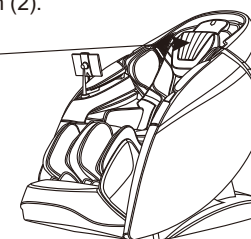

Przed użyciem

Sprawdzenie otoczenia

Upewnij się, że wokół urządzenia nie ma ludzi, zwierząt domowych i innych przedmiotów.




Upewnij się, że w szczelinach urządzenia nie ma żadnych przedmiotów

Przed masażem upewnij się, że w podnóżku, przy stopach itp. nie znajdują się żadne obce przedmioty.

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy i głowa zagłębiały się w obszar pomiędzy mechanizmem dolnej części podnóżka a korpusem głównym lub obszar pomiędzy podłokietnikami a oparciem.

W żadnym wypadku nie wolno dopuścić, aby ręce, stopy lub głowa dostały się pod tkaninę lub skórę pokrywającą powierzchnię masażu.

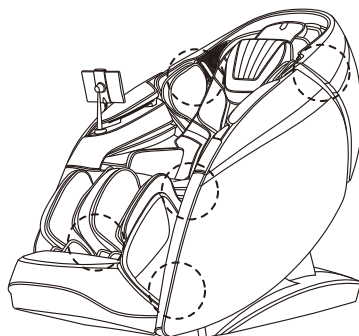

Przed użyciem

Włączanie zasilania




OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone.
- Zasilanie tego urządzenia należy dostarczać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi mocy roboczej tego urządzenia.
- Surowo zabrania się używania zasilania innego niż nominalne zasilanie tego produktu.
- Surowo zabrania się podłączania różnych urządzeń do konwersji zasilania bez autoryzacji do zasilania tego produktu.

Budowa fotela masującego


Opis poszczególnych elementów

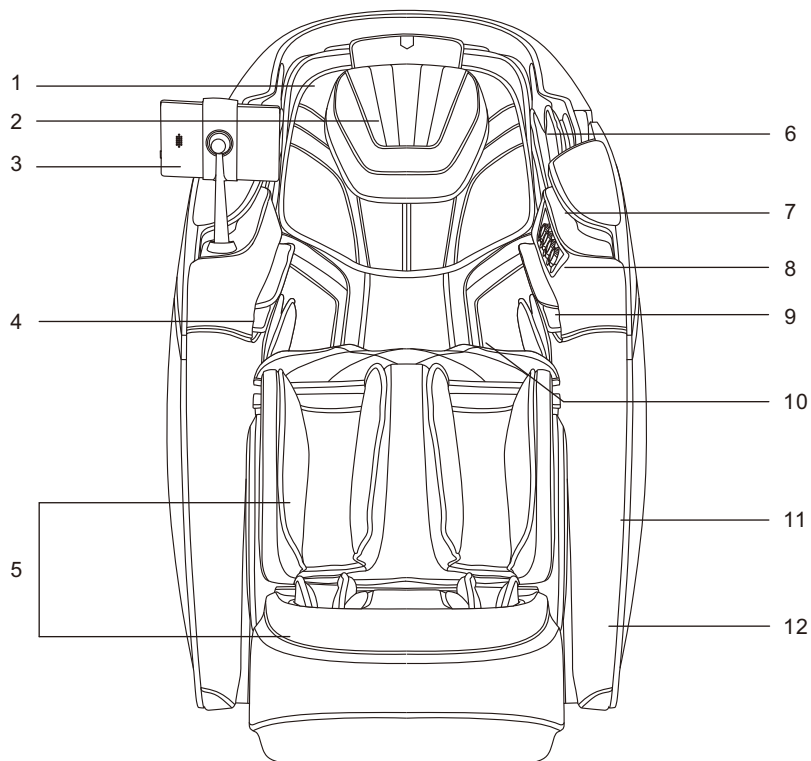

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Duża poduszka pod głowę | 7. Oświetlenie Ambiente |
| 2. Mała poduszka pod głowę | 8. Przyciski szybkiego dostępu w podłokietniku |
| 3. Pilot | 9. Czujnik stanu zdrowia- skaner |
| 4. Poduszka powietrzna przedramion | 10. Poduszka oparcia |
| 5. Elementy masażer nóg | 11. Panel boczny |
| 6. Poduszka powietrzna ramion | 12. Oświetlenie Ambiente |

Budowa fotela masującego

Schemat rozkładu funkcji

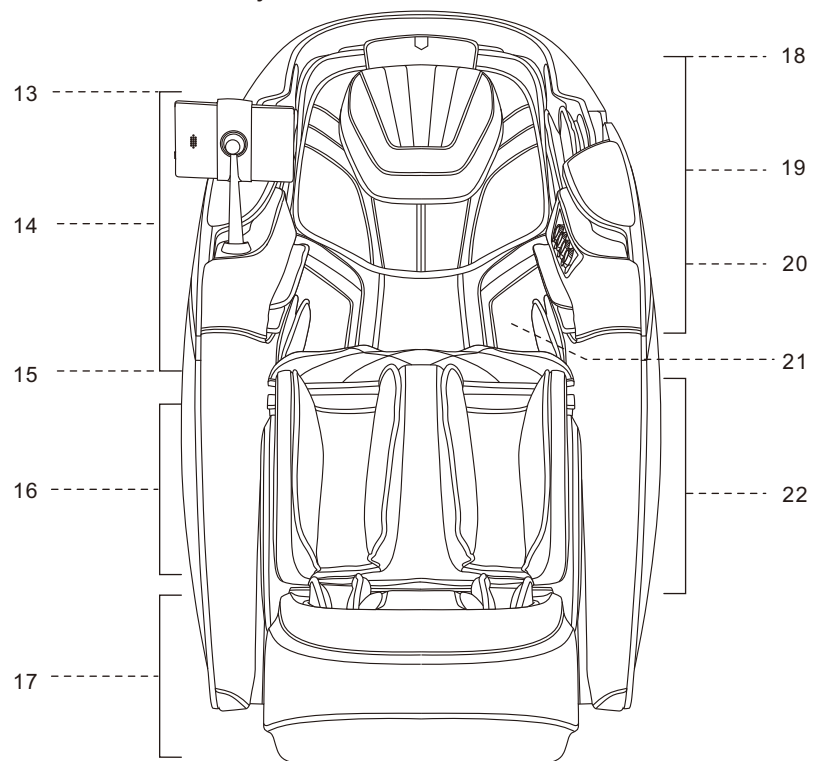

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 13. Ramiona | 19. Przedramiona |
| ·Masaż poduszkami powietrznymi | ·Bezprzewodowa ładowarka |
| 14. Przedramiona | ·Port ładowania USB |
| ·Uchwyt na pilot | Masaż poduszkami powietrznymi |
| ·Funkcja sterowania głosowego | ·Jonizator powietrza |
| ·Masaż poduszkami powietrznymi | 20. Od głowy do pośladków |
| 15. Ręce | ·Podwójny rdzeń mechaniczny |
| ·Masaż poduszkami powietrznymi | ·Masaż rozgrzewający |
| 16. Noga | 21. Ramiona, plecy, talia, brzuch |
| ·Masaż poduszkami powietrznymi | ·Funkcja grzania |
| 17. Stopy | 22. Nogi |
| ·Masaż rolkowy | ·Masaż poduszkami powietrznymi |
| 18. Po obu stronach głowy | ·Masaż ugniatający |
| ·Odtwarzacz cyfrowy 3D | ·Masażer łydek |
| ·Odtwarzacz muzyki | |

Budowa fotela masującego

Sposób używania kołnierza do ogrzewania

Fotel posiada unikalny kołnierz z innowacyjnymi funkcjami ogrzewania ramion, pleców, talii i brzucha. Możesz umieszczać kołnierz w różnych pozycjach masażu, w zależności od swoich preferencji.


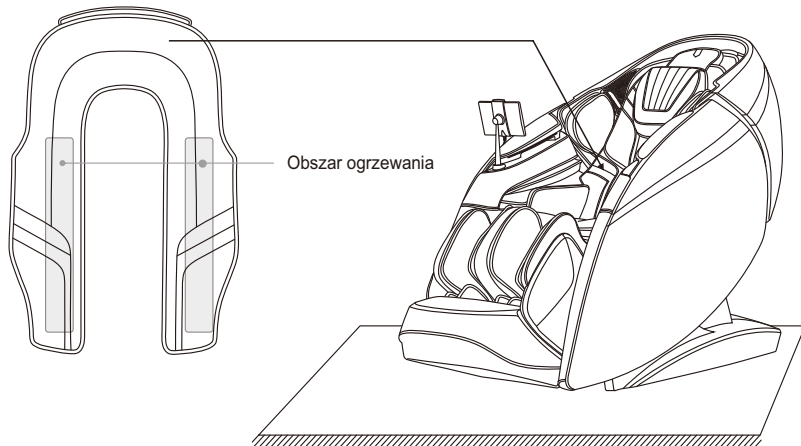


Diagram obrazujący zastosowanie na plecach i talii


Kiedy kołnierz jest umieszczony na plecach i w talii, poprzez wbudowane ogrzewanie, ciepło rozgrzewa głębokie meridiany pleców, wspomaga krążenie krwi i ogrzewa nerki, łagodzi ból krzyża, sztywność pleców z powodu zimna, ból i inne schorzenia.

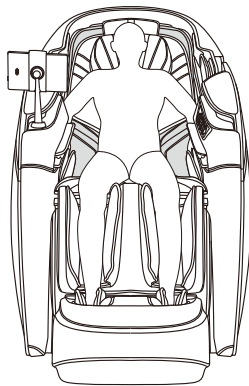

Budowa fotela masującego

Diagram obrazujący zastosowanie na ramionach i brzuchu

Kiedy kołnierz zostanie umieszczony na ramionach (przód/tył), rozgrzeje punkty akupunkturowe, takie jak Bingfeng, Tianzong, Yunmen i Qihu wokół ramion i obojczyka, poprzez wbudowane w niego ogrzewanie. Można go również założyć na przód, aby ogrzać brzuch.


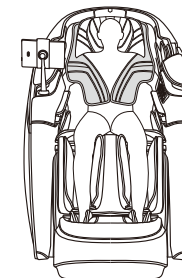


Schemat- prawidłowe korzystanie z kołnierza do ogrzewania




UWAGA

1. **Prawidłowe umiejscowienie i użytkowanie:** Gdy kołnierz jest używany na plecach (lub fotel masujący nie jest włączony), należy umieścić kołnierz po obu stronach oparcia i ustawić dolny magnes oraz poduszkę oparcia w pozycji lędźwiowej. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji kołnierza, unieś go delikatnie i przełóż ostrożnie za oparcie fotela.
2. **Niewłaściwe umiejscowienie i użytkowanie:** Gdy kołnierz jest używany na plecach (lub fotel masujący nie jest włączony), nie należy ścisnąć kołnierza w obszarze pracy głównego masażera, wzdłuż linii kręgosłupa, może to prowadzić do awarii funkcji ogrzewania, uszkodzenia fotela masującego i innych poważnych usterek. Nie należy zwijać, skręcać, krzyżować kołnierza oraz zakładać i nosić szala na plecach.

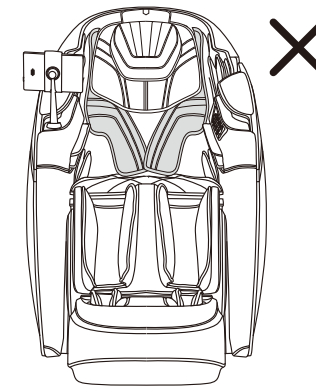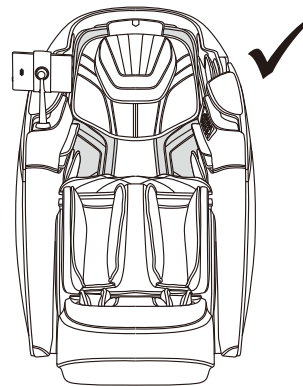


Budowa fotela masującego

Instrukcja obsługi przycisków na pilocie

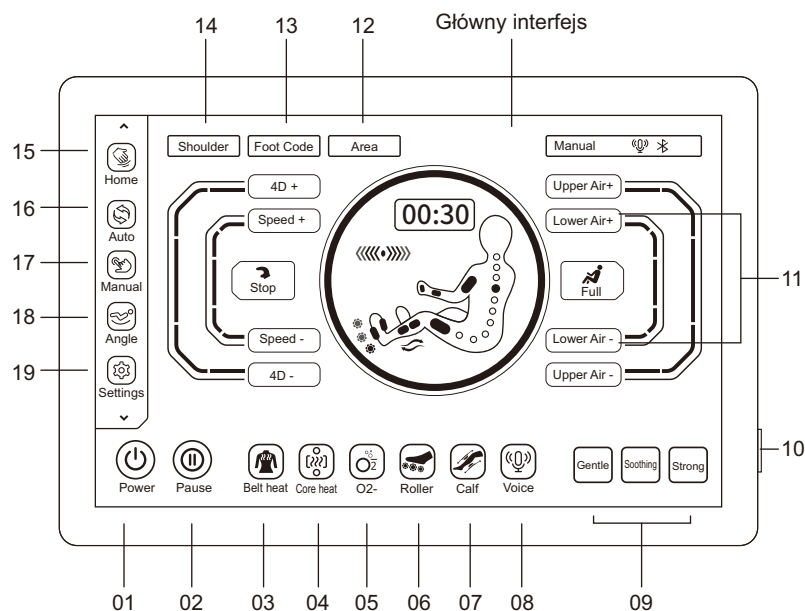

01. Włącz/Wyłącz: Włącza/wyłącza funkcje fotela masującego
02. Pauza: Wstrzymuje masaż lub wznowia masaż
03. Ogrzewanie kołnierza: Włącza/wyłącza funkcję ogrzewania
04. Ogrzewanie- rdzeń masażera: Włącza/wyłącza funkcję ogrzewania w rdzeniu ramion masujących
05. O2- jonizator: Włącza/wyłącza funkcję jonizacji powietrza
06. Masaż rolowy stóp: Włącza/wyłącza funkcję masażu rolowego stóp
07. Masaż ugniatający tyłek: Włącza/wyłącza funkcję ugniatania tyłek.
08. Sterowanie głosowe: Włącza/wyłącza funkcję sterowania głosowego.
09. Intensywność masażu: Wybierz jedną z trzech automatycznych intensywności masażu (delikatny/komfortowy/mocny).
10. Włącz/Wyłącz: Włącza/wyłącza fotel masujący.
11. Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi- dolne partie ciała: Zwiększ + / Zmniejsz - ciśnienie poduszek powietrznych
12. Obszar masażu: Wybierz odpowiednią partię ciała (tylko przy programach manualnych)
13. Rozmiar stopy: Wybierz odpowiedni rozmiar stopy.


Budowa fotela masującego

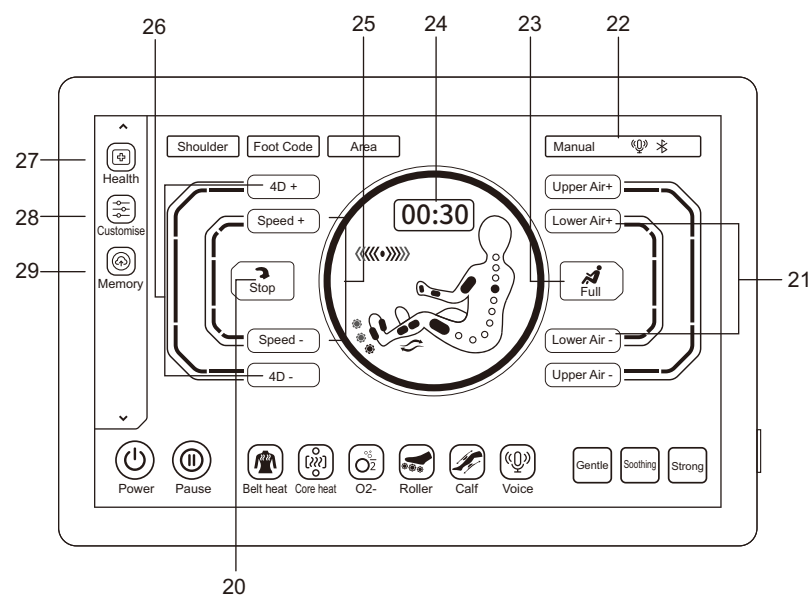

20. Techniki masażu: Wybierz technikę masażu
21. Regulacja intensywności masażu poduszkami powietrznymi- górne partie ciała: Zwiększ + / Zmniejsz - ciśnienie poduszek powietrznych.
22. Aktualny status: Wyświetla informacje o aktualnym statusie programu masażu.
23. Masaż poduszkami powietrznymi: Wybierz partię ciała.
24. Czas: Ustaw czas masażu.
25. Szybkość masażu: Dostosuj szybkość masażu.
26. Intensywność masażu 4D: regulacja intensywności masażu 4D
27. Wykrywanie stanu zdrowia: Wybierz, aby zeskanować parametry stanu zdrowia
28. Ustawienia Użytkownika.
29. Pamięć.

Budowa fotela masującego

Opis przycisków szybkiego wyboru na podłokietniku

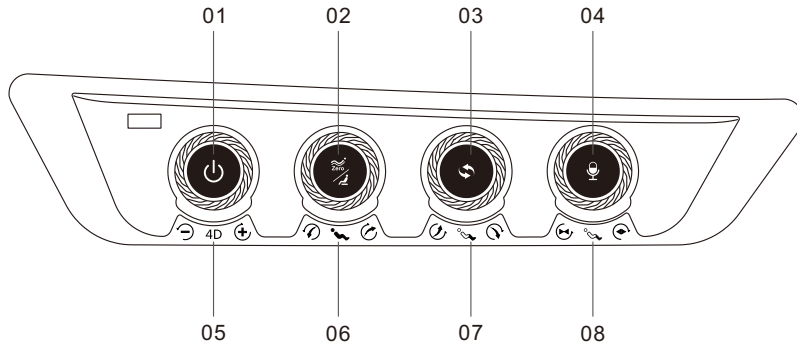

01. Włącz/wyłącz fotel.

·Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć fotel masujący. Po włączeniu masażu należy krótko nacisnąć klawisz pauzy/uruchomienia.

02. Zero gravity

·Naciśnij ten przycisk, aby automatycznie ustawić kąt zerowej grawitacji (dwa poziomy). Długie naciśnięcie klawisza na 2 sekundy powoduje powrót do pozycji początkowej, opuszczenie podnóżka do najniższej pozycji i podniesienie oparcia do najwyższej pozycji.

03. Programy automatyczne

·Automatyczne przełączanie programu masażu

04. Sterowanie głosem

·Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję sterowania głosowego. Krótko naciśnij klawisz, aby włączyć funkcję.

05. Pokrętko intensywności 4D

·Obróć pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć intensywność 4D. Obracając pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zmniejszysz intensywność 4D.

06. Pokrętko do regulacji oparcia

Obracaj pokrętkiem, aby powoli podnosić lub opuszczać oparcie. Pozycja podnóżka dopasuje się automatycznie.

07. Pokrętko do regulacji pozycji podnóżka

Obróć pokrętko, aby powoli podnieść lub opuścić podnóżek. Pozycja podnóżka ustawi się automatycznie, gdy pokrętko nie zostanie użyte.


08. Pokrętko do regulacji odległości podnóżka

Obróć pokrętko, aby powoli oddalić lub przybliżyć podnóżek. Mechanizm zatrzymuje się w momencie zatrzymania ruchu pokrętkła.

Instrukcja obsługi


I.Rozpoczęcie masażu

- 1.Naciśnij na podręcznym panelu sterowania przycisk On/Off lub dłużej przytrzymaj przycisk On/Off na podłokietniku.
- 2.Po włączeniu systemu należy wybrać intensywność masażu jednym z przycisków na ekranie: Delikatny (Gentle) , Komfortowy (Soothing) lub Mocny (Strong) , aby rozpocząć skanowanie ciała i uruchomić masaż. Jeżeli w ciągu 5 minut nie zostanie wybrana intensywność masażu, fotel masujący automatycznie się wyłączy.

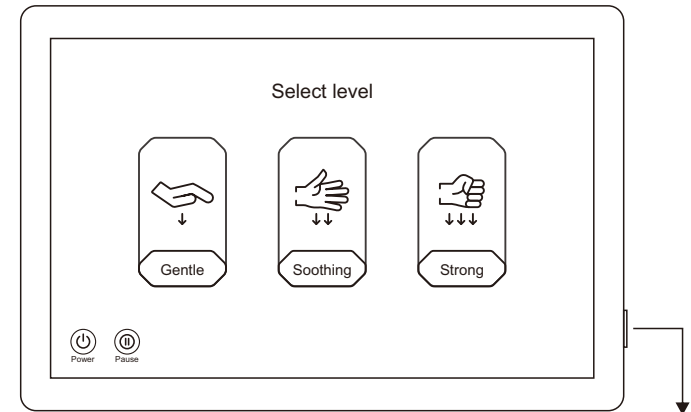


Naciśnij ten przycisk, aby włączyć fotel

- 3.W przypadku automatycznej regulacji rozłożenia fotela, należy wybrać program automatyczny, wówczas fotel zostanie ustawiony w pozycji Zero Gravity. Należy poczekać, aż jego ustawianie zostanie zakończone. Aby pominąć dany krok, należy nacisnąć przycisk Pomiń (Skip), aby przejść bezpośrednio do następnego kroku.

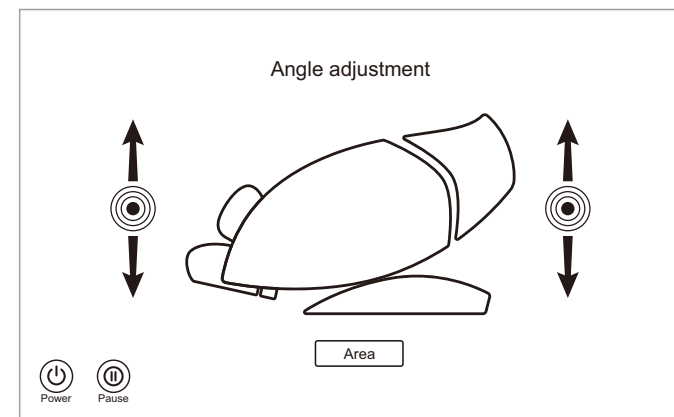


Instrukcja obsługi


4. Poczekaj, aż skanowanie kształtu ciała zostanie zakończone, lub naciśnij przycisk pomiń (skip), aby pominąć skanowanie i natychmiast rozpocząć masaż.

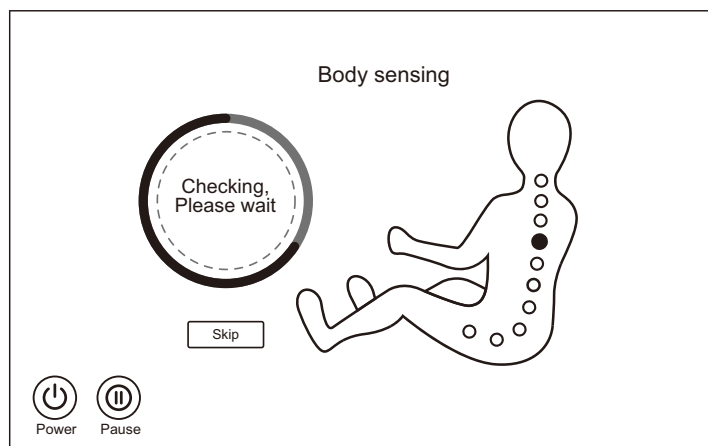

W celu dokładnego ustawienia pozycji ramion, po zeskanowaniu kształtu ciała, pilot lub komunikat głosowy przypomni Tobie o dokładnym dostosowaniu pozycji ramion. Jeżeli ramiona masujące zatrzymają się na odpowiedniej wysokości, naciśnij od razu przycisk OK, aby rozpocząć masaż. Jeśli nie, użyj przycisku w górę / w dół, aby ustawić ramiona masujące w odpowiednim położeniu, a następnie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć masaż. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, zostanie wybrana domyślna pozycja ramion masujących i rozpocznie się masaż.

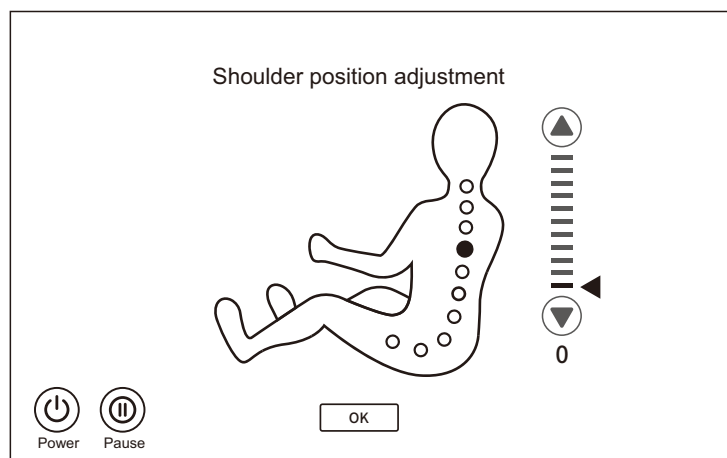

Instrukcja obsługi

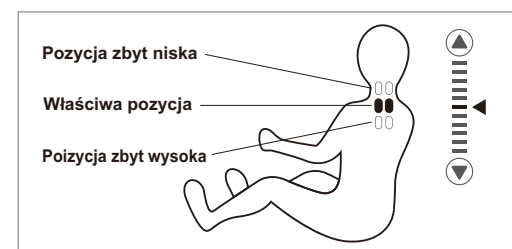

II. Funkcja Pauzy (używaj tej funkcji dopiero po włączeniu fotela)


Po włączeniu fotela masującego naciśnij przycisk pauzy, aby wstrzymać masaż. Wszystkie funkcje masażu zostaną wstrzymane, a następnie naciśnij przycisk pauzy ponownie, aby wznowić pracę w poprzednim stanie. Uwaga: W trybie pauzy nie działają żadne funkcje oprócz wyłączenia.

III. Program automatyczny (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela) Automatyczny wybór programu

(1) Wybierz przycisk Automatyczny na lewym pasku menu, aby przejść do interfejsu automatycznego wyboru.

(2) Dostępnych jest 20 programów automatycznych: Totalny relaks, Uwolnienie stresu, Masaż poduszkami powietrznymi, Masaż chiński, Masaż tajski, Masaż meridianów, W trosce o szyję i ramiona, Pielęgnacja talii, Modelowanie talii i pośladków, Ulga dla nóg i stóp, Komfortowy, Dbanie o kondycję, Nadzwyczajna przyjemność, Pracownik biurowy, Regeneracja, Zastrzyk energii, Przerwa na lunch, Na dobranoc, Odświeżenie umysłu, Odmładzający.

(3) Wybierz żądany program automatycznego masażu i kliknij, aby rozpocząć masaż.

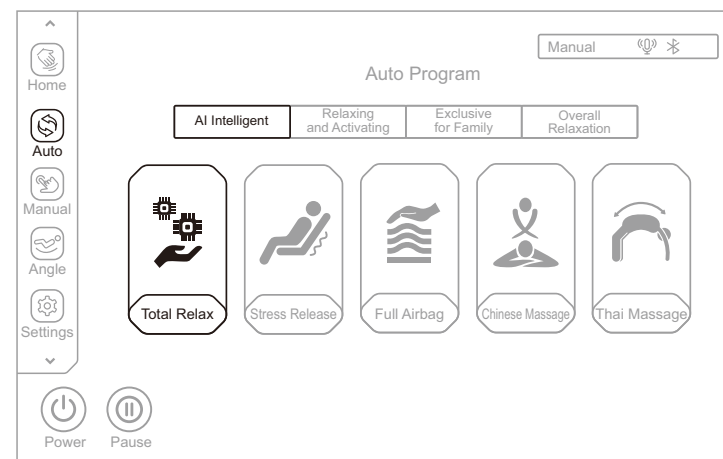

Schemat wyboru automatycznego programu masażu

Instrukcja obsługi

Programy masażu z wykorzystaniem algorytmu sztucznej inteligencji AI	
Funkcja	Opis
Totalny relaks	Ramiona górnego masażera masują szyję, ramiona i punkty akupunktury Fengchi poprzez ugniatanie, ostukiwanie oraz technikę Shiatsu (masażu całego ciała). Dolny masażer masuje talię i biodra poprzez ugniatanie i ostukiwanie. Oba masażery współpracują ze sobą, aby pomóc rozluźnić mięśnie całego ciała i złagodzić zmęczenie.
Uwolnienie stresu	Masaż szyi, ramion i punktów akupunktury Dazhui, głównie poprzez technikę ugniatania, aby złagodzić ogólne napięcia i obniżyć ciśnienie.
Masaż poduszkami powietrznymi	Masaż kompresyjny (uciskowy) całego ciała, połączony z masażem rolkowym stóp i ugniatającym łydek. Dzięki funkcji rozciągania łydek ucisk mechaniczny działa automatycznie jak pod wpływem nacisku dłoni.
Masaż chiński	Masaż oparty na tradycyjnej medycynie chińskiej, z zastosowaniem masażu 4D pleców i talii, aby pobudzić krążenie krwi w plecach i talii, ukoić meridiany i złagodzić blokady pleców oraz talii.
Masaż tajski	Masaż odbywa się głównie za pomocą poduszek powietrznych, które zaciskają nogi, dłonie, ramiona i biodra, a następnie łydki. Kombinacja kąta odchylenia oparcia oraz siła nacisku ramion masujących w linii talii powoduje efekt rozciągania. Uwaga: są trzy poziomy intensywności rozciągania. Aby uzyskać delikatne rozciąganie, wybierz najniższy poziom intensywności masażu. Aby uzyskać mocne rozciągnięcie, wybierz najsilniejszy poziom intensywności masażu.

Instrukcja obsługi

Programy masażu (Relaks i pobudzenie)	
Funkcja	Opis
Masaż meridianów	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, oklepywania i shiatsu. Jego celem jest aktywacja meridianów.
W trosce o szyję i ramiona	Masaż szyi i ramion głównie za pomocą technik ugniatania i rozciągania, a także górnej części pleców za pomocą masażu leczniczego oraz nacisk na punkty akupunktury Jianjing,. Łagodzi spondylozę szyjną oraz daje efekt rozluźnienia mięśni szyi i ramion.
Pielęgnacja talii	Masaż talii z zastosowaniem technik ugniatania, oklepywania i opukiwania oraz masaż talii 4D.
Modelowanie talii i pośladków	Masaż zaczyna się od pośladków głównie poprzez ugniatanie i masaż leczniczy. Następnie poprzez opukiwanie i ugniatanie masażer dociera głęboko pod pośladki aby rozluźnić mięśnie i unieść biodra. Odpowiedni dla kobiet- rozluźnia mięśnie w okolicy bioder a także dla mężczyzn, którzy dbają o prostatę.
Ulga dla nóg i stóp	Masaż łydek i stóp odbywa się poprzez pracę poduszek powietrznych, jest to masaż kompresyjny, odprężający. Jednocześnie masowane są ramiona i talia, głównie poprzez zastosowanie technik ugniatania i oklepywania.

Instrukcja obsługi

Programy masażu (Rodzinne)	
Funkcja	Opis
Komfortowy	Łagodzi zmęczenie, pobudza krążenie krwi i pozwala uwolnić się od stresu poprzez głęboki masaż przy zastosowaniu technik ugniatania i oklepywania, każdej oddzielnie oraz w trybie mieszanym.
Dbanie o kondycję	Masaż ramion, szyi, talii i bioder za pomocą technik ugniatania i Shiatsu. Pozwala zrelaksować ciało i umysł poprzez masaż całego ciała. Intensywność masażu jest delikatna.
Nadzwyczajna przyjemność	Delikatny masaż całego ciała wraz z masażem rolkowym stóp oraz z zastosowaniem masażu ugniatającego łydki. Łagodzi napięcia w obszarze pleców.
Pracownik biurowy	Masaż ramion, szyi i talii, głównie za pomocą technik ugniatania, oklepywania, oraz łączenia obu technik. Łagodzi napięcia ramion i szyi, a także zmniejsza bolesność mięśni w odcinku lędźwiowym kręgosłupa poprzez głęboki masaż. Odpowiedni dla osób pracujących umysłowo i prowadzących siedzący tryb życia.
Regeneracja	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Pobudza krążenie krwi w całym ciele i zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi. Jest odpowiedni dla osób, które spędzają dużo czasu w domu i nie lubią wychodzić. Intensywność masażu jest umiarkowanie delikatna.

Instrukcja obsługi

Programy masażu (Pełen relaks)	
Funkcja	Opis
Zastrzyk energii	Głęboki masaż całego ciała za pomocą ugniatania, oklepywania i technik Shiatsu. Ma na celu wzmocnić siły witalne i pobudzić energię.
Przerwa na lunch	Masaż pleców i talii za pomocą technik ugniatania i oklepywania, a następnie uciskania punktów akupunktury Shenyu. Zastrzyk energii na kolejną połowę dnia pracy.
Na dobranoc	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, masażu leczniczego oraz poprzez nacisk na punkty akupunkturuwe Fengchi i Shenyu. Ma na celu pomóc w zasypianiu i poprawić jakość snu.
Odświeżenie umysłu	Masaż ramion, szyi, pleców i talii za pomocą technik ugniatania, ugniatania 4D i Shiatsu. Pozwala osiągnąć wysoki stopień harmonii fizycznej i psychicznej poprzez głęboki masaż. Intensywność masażu jest delikatna.
Odmładzanie	Masaż pleców oraz talii, głównie poprzez technik ugniatania i ostukiwania, aby pobudzić krążenie krwi, wyeliminować miejscowy ból mięśni, przyspieszyć wydalanie kwasu mlekowego i pobudzić witalność.


Instrukcja obsługi

IV. Program manualny (proszę używać tej funkcji dopiero po włączeniu urządzenia)

Wybór programu manualnego

Wybierz przycisk zdalnego sterowania na lewym pasku menu i kliknij, aby wejść do zdalnego menu w celu wyboru techniki masażu, obszaru masażu, intensywności 4D, regulacji ramion masujących, szerokości masażu, prędkości masażu, masażu powietrzem, intensywności masażu poduszkami powietrznymi i innych funkcji.

1. W menu techniki masażu dostępnych jest łącznie 17 opcji, w tym ugniatanie, oklepywanie I, oklepywanie II, ugniatanie i oklepywanie, uciskanie palcami I, uciskanie palcami II, chwyt za ramię, 4DI, 4DII, 4DIII i 4DIV. (Uwaga: Klikając na przyciski "strzałka w lewo i strzałka w prawo" w menu 'Program manualny', można przewijać listę w lewo i w prawo, aby wyświetlić więcej technik masażu).

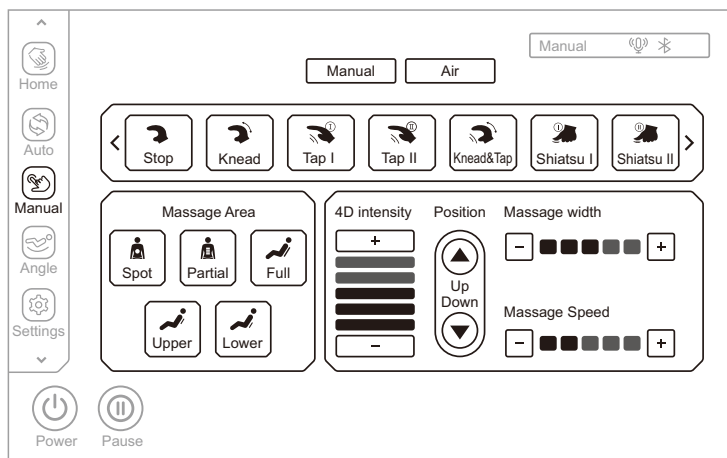


Program manualny- schemat wyboru technik

Funkcja	Ustawienia ramion masujących	
4D I	Szybkość I siła.	-Regulacja prędkości w pięciu poziomach
4D II	Szybkość I siła.	-Regulacja szerokości w pięciu poziomach
4D III	Szybkość, szerokość I siła.	-Regulacja intensywności w pięciu poziomach
4D IV	Szybkość, szerokość I siła.	-Regulacja intensywności w pięciu poziomach

Instrukcja obsługi


Funkcja	Ustawienia ramion masujących	
Stop	Naciśnij ten przycisk, aby masować bez zastosowania jakiegokolwiek techniki.	Regulacja prędkości w pięciu poziomach
Ugniatanie	Można regulować prędkość i natężenie.	
Oklepywanie I	Można regulować prędkość, szerokość i natężenie.	
Oklepywanie II	Można regulować prędkość, szerokość i natężenie.	Regulacja szerokości w pięciu poziomach
Ugniatanie i ostukiwanie	Można regulować prędkość i natężenie.	Regulacja intensywności w pięciu poziomach
Shiatsu I	Można regulować prędkość, szerokość i natężenie.	
Shiatsu II	Można regulować prędkość, szerokość i natężenie.	
Chwytnie	Można regulować prędkość i natężenie.	

Uwaga: Można również kliknąć przycisk Ekranu głównego i wybierając Stop, zmienić rodzaj na odpowiednią technikę masażu w oknie które się wyświetli (to szybsza droga aby zmienić technikę masażu)

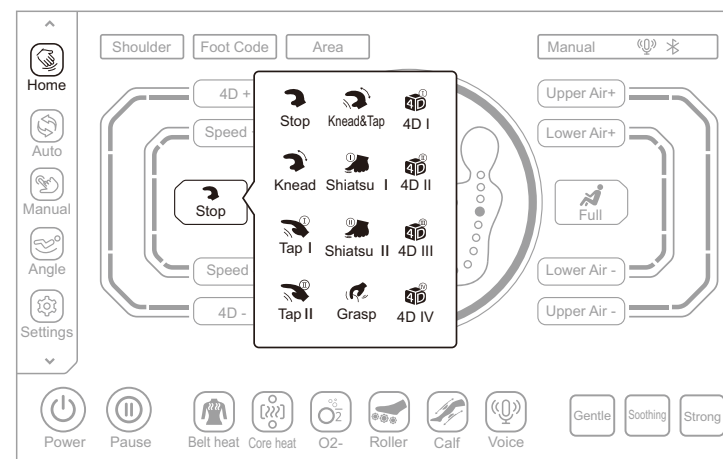

Instrukcja obsługi

2. Menu dotyczące obszaru masażu zawiera pięć opcji: Punktowy, Odcinkowy, Pełny, Górne części ciała i Dolne części ciała. Należy wybrać odpowiedni obszar do masażu.

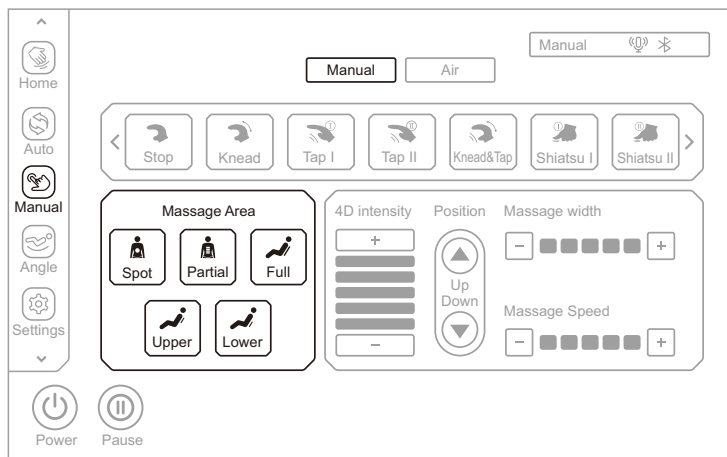


Program manualny - schemat wyboru obszaru masażu

Przycisk	Opis
	Masaż punktowy w ustalonej pozycji.
	Miejscowy masaż w małym zakresie w obu kierunkach.
	Masaż całych pleców w obu kierunkach.
	Masaż górnej części pleców w obu kierunkach.
	Masaż dolnej części pleców w obu kierunkach.


Uwaga: Klikając 'Menu główne' możesz również poprzez przycisk 'Obszar', wybrać odpowiedni obszar masażu w menu podręcznym (to szybsza droga do przełączania obszarów masażu na bieżącym ekranie- obszar masażu).

Instrukcja obsługi

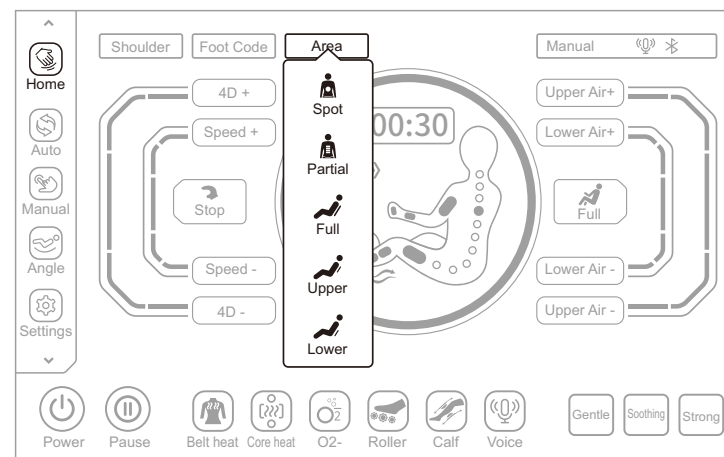

Bieżący ekran - schemat wyboru obszaru masażu

3. W menu natężenia 4D można regulować intensywność masażu 4D. Do wyboru mamy 5 poziomów, przy czym 1 oznacza najstabszy, a 5 najsilniejszy. Im większa intensywność masażu 4D, tym większy nacisk ramion masujących i większe natężenie masażu. Intensywność masażu 4D zmienia się przyciskami plus i minus.

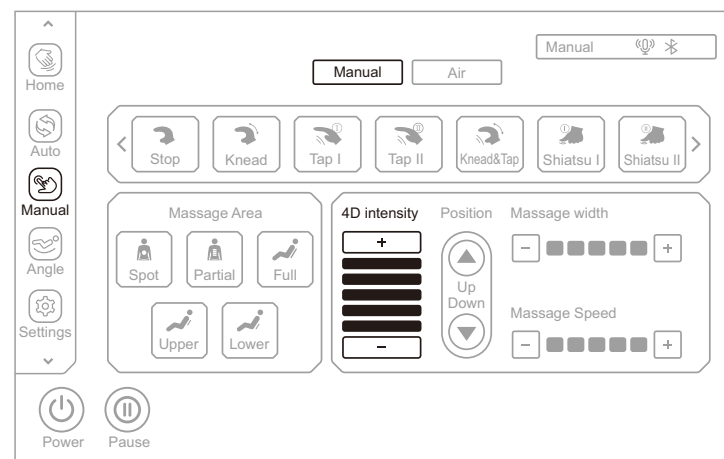


Program manualny- schemat regulacji intensywności masażu 4D

Instrukcja obsługi




Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć intensywność masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć intensywność masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.

Uwaga: Na bieżącym ekranie można również wybrać intensywność 4D + lub intensywność 4D -, aby dostosować siłę masażu 4D. (to szybsza droga do zmiany intensywności masażu 4D na bieżącym ekranie programu manualnego - intensywność 4D).

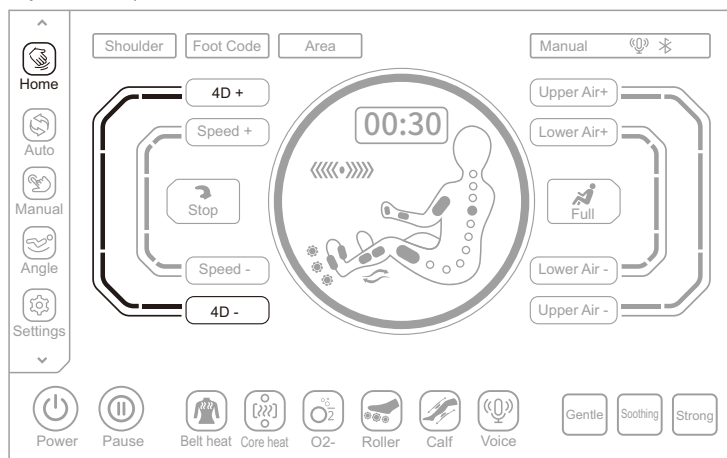


Aktualny stan - program manualny intensywność 4D

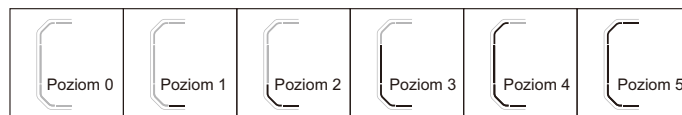

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć intensywność masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć intensywność masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.


Instrukcja obsługi

4. W przypadku masażu punktowego i odcinkowego należy ustawić manipulator, wybierając strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby odpowiednio wyregulować położenie masażera, przesuając go w górę lub w dół.

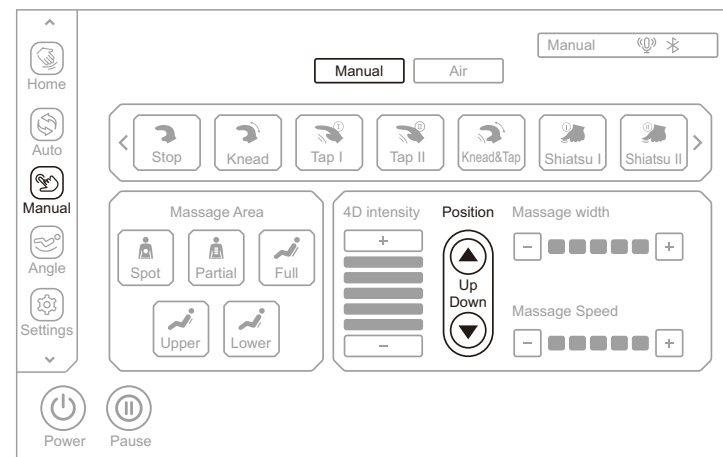

Program manualny - schemat regulacji położenie masażera


5. Jak pokazano na poniższym rysunku, żeby ustawić szerokość masażu, należy wybrać szerokość masażu.

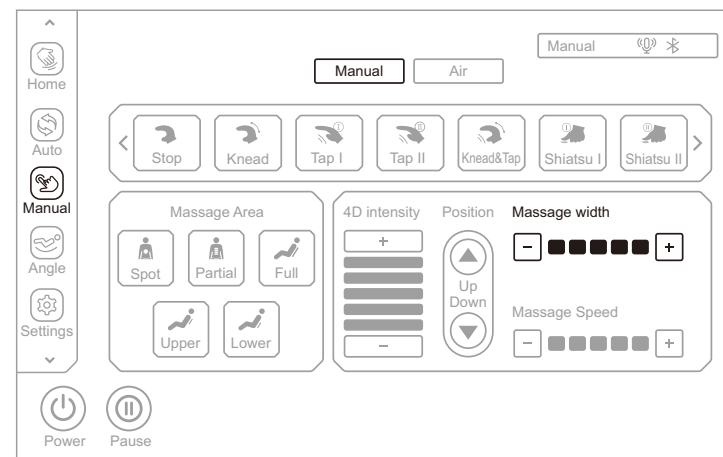

Program manualny - schemat ustawienia szerokości masażu


Instrukcja obsługi

- (1) Szerokość można regulować wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wejdzie w tryb zdalny przy wyborze techniki masażu lub obszaru masażu.
 (2) Szerokość masażu można regulować w zakresie od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najwęższy, a 5 najszerszy. Używaj następujące techniki masażu: Oklepywanie I, Oklepywanie II, Uciskanie palcami I, Uciskanie palcami II, 4D III i 4D IV.

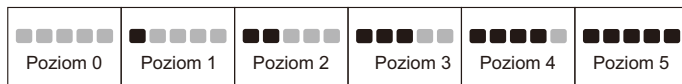

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szerokości masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć szerokości masażu 4D, którą możesz regulować w zakresie od 1 do 5.

6. Jak pokazano na poniższym rysunku, żeby ustawić szybkość masażu, należy wybrać szybkość masażu.

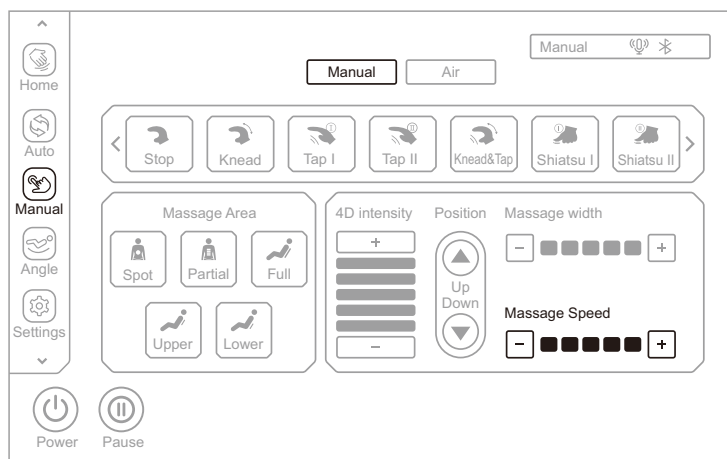

Program manualny - schemat ustawienia szybkości masażu


- (1) Szybkość można regulować tylko wtedy, gdy użytkownik wejdzie w tryb manualny przy wyborze techniki masażu lub pozycji masażu.
 (2) Szybkość masażu jest dostępna w zakresie od 1 do 5, przy czym 1 oznacza najszybszy, a 5 najwolniejszy tryb. Szybkość nie może być regulowana, gdy technika masażu zostanie zatrzymana.

Instrukcja obsługi




Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szybkość masażu, możesz ją regulować w zakresie od 1 do 5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć szybkość masażu, możesz ją regulować w zakresie od 1 do 5.

- Uwaga: W celu dostosowania prędkości masażu można również wybrać przycisk + Szybkość + lub - Szybkość - na bieżącym ekranie.

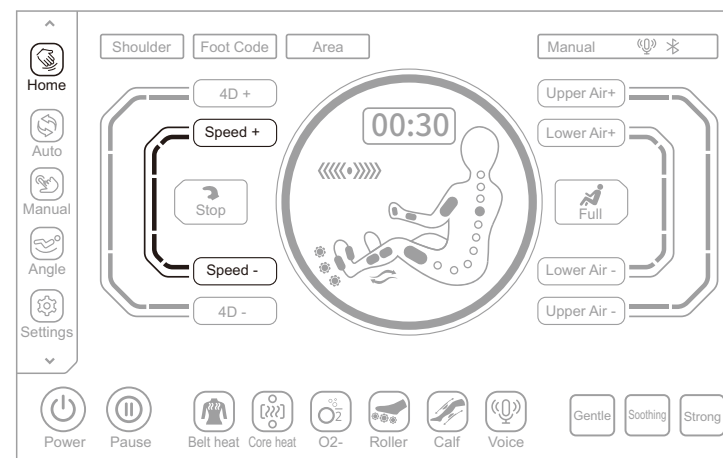


Bieżący ekran - schemat regulacji szybkości masażu

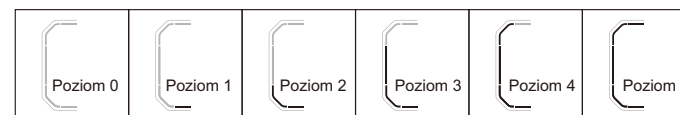

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć szybkość masażu, możesz ją regulować w zakresie od 1 do 5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć szybkość masażu, możesz ją regulować w zakresie od 1 do 5.

Instrukcja obsługi

7. W przypadku masażu poduszkami powietrznymi, jak pokazano na poniższym rysunku, należy wejść do menu masażu poduszkami powietrznymi, aby wybrać masaż poduszkami powietrznymi. Ten rodzaj masażu obejmuje masaż górnych partii ciała, dolnych partii ciała i całego ciała. Funkcja masażu poduszkami powietrznymi zostanie zablokowana, gdy żaden z powyższych trybów nie będzie aktywny.

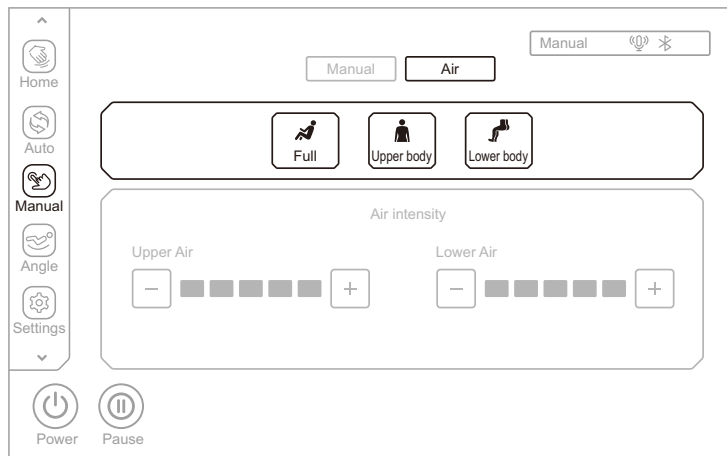


Program manualny – schemat masażu poduszkami powietrznymi

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu całego ciała poduszkami powietrznymi.
	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu górnych części ciała poduszkami powietrznymi.
	Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć funkcję masażu dolnych części ciała poduszkami powietrznymi.

Zakres masażu poduszkami powietrznymi- widok na ekranie		
Masaż górnych partii ciała	Masaż dolnych partii ciała	Masaż całego ciała


Instrukcja obsługi

Uwaga: Na bieżącym ekranie możesz również nacisnąć przycisk masażu poduszkami powietrznymi "Całość", a następnie wybrać odpowiedni zakres w menu podręcznym. (To szybsza droga do wyboru zakresu masażu poduszkami powietrznymi w programie manualnym).

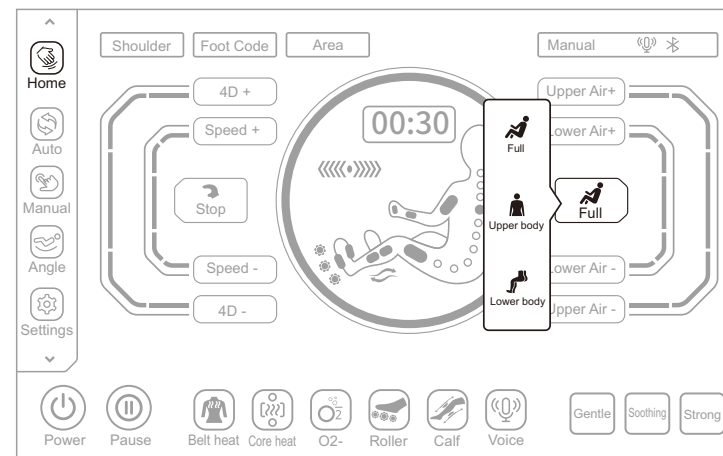


Bieżący ekran - schemat regulacji masażu poduszkami powietrznymi

8. Żeby wyregulować intensywność masażu, należy włączyć funkcję masażu poduszkami powietrznymi i ustawić intensywność na jednym z 5 poziomów, przy czym 1 oznacza najslabszy, a 5 najsilniejszy.

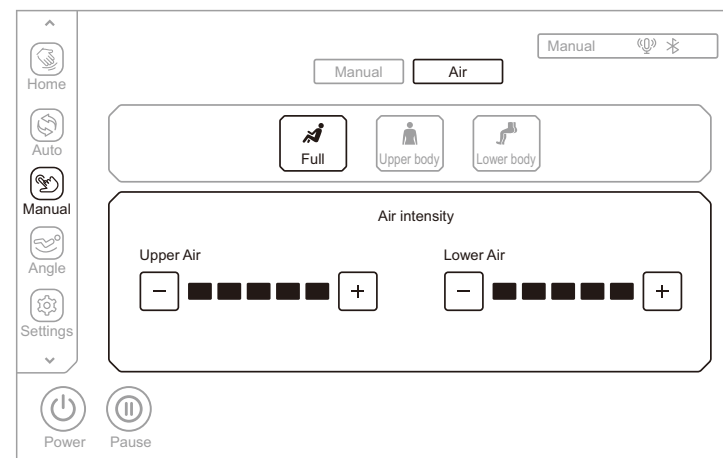


Instrukcja obsługi

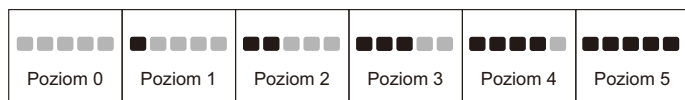

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi, którą możesz regulować w zakresie od 1 do -5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć intensywność masażu poduszkami powietrznymi którą możesz regulować w zakresie od 1 do -5.

Uwaga: Wyregulować intensywność pracy poduszek powietrznych, możesz również za pomocą przycisku + lub -. Przycisk intensywność na ekranie głównym umożliwia regulację intensywności masażu poduszkami powietrznymi na 5 poziomach.

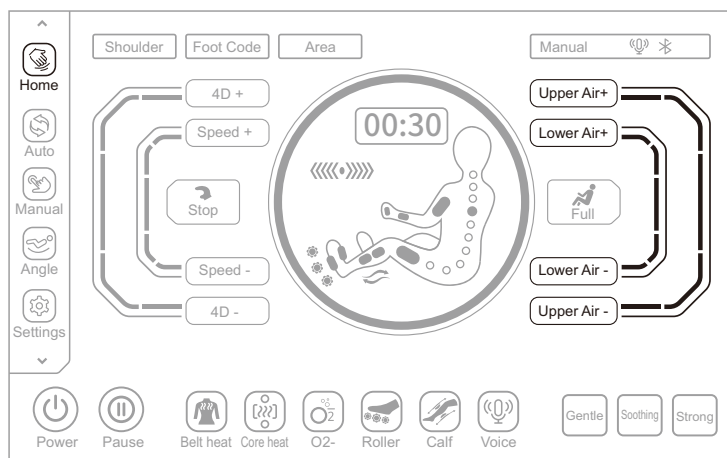

Bieżący ekran - schemat regulacji masażu poduszkami powietrznymi




Instrukcja obsługi

Przycisk	Opis
	Naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć intensywność powietrza, w zakresie od 1 do -5.
	Naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć intensywność powietrza, w zakresie od 1 do -5.

V.Regulacja pozycji rozłożenia fotela

Kliknij przycisk "Pozycja " na pasku menu po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić ekran regulacji pozycji rozłożenia fotela. Zakres regulacji obejmuje wysunięcie i odchylenie podnóżka, podnoszenie/opuszczanie oparcia, pozycję Zero Gravity I, Zero Gravity II i inne funkcje masażu.

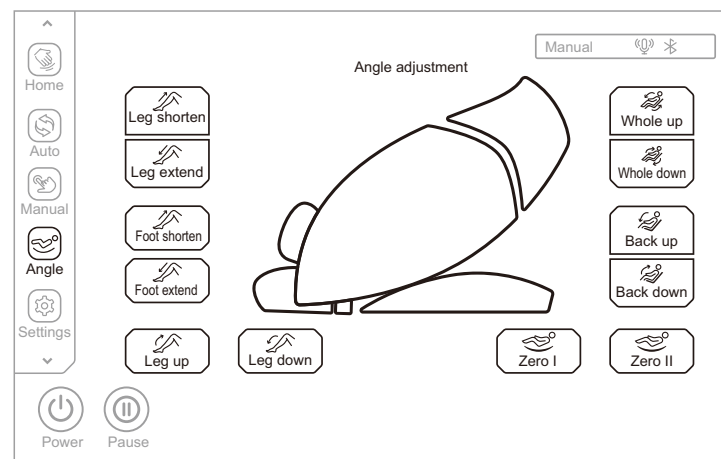



Schemat regulacji pozycji rozłożenia fotela

1.Ustawienie pozycji Zero Gravity



Przycisk	Opis
	Przycisk Zero Gravity I: automatyczne ustawienie pozycji modułu na nogi i oparcia do pozycji Zero Gravity I.
	Przycisk Zero Gravity II: automatyczne ustawienie pozycji modułu na nogi i oparcia do pozycji Zero Gravity II.

Instrukcja obsługi



2.Regulacja wydłużania/skracania podnóżka-obszar stóp

Przycisk	Opis
 Skrócenie podnóżka	Przycisk skrócenia podnóżka: umożliwia zdalną regulację skrócenia podnóżka- części na stopy; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć podnózek w górę; zatrzyma się po zwolnieniu przycisku.
 Wydłużenie podnóżka	Przycisk wydłużenia podnóżka: umożliwia zdalną regulację wydłużenia podnóżka- części na stopy; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć podnózek w dół; zatrzyma się po zwolnieniu przycisku.



3.Regulacja podnoszenia/opuszczania podnóżka

Przycisk	Opis
 Skrócenie podnóżka	Przycisk skrócenia podnóżka: umożliwia zdalną regulację skrócenia podnóżka; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć podnózek w górę; zatrzyma się po zwolnieniu przycisku.
 Wydłużenie podnóżka	Przycisk wydłużenia podnóżka: umożliwia zdalną regulację wydłużenia podnóżka; naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli przesunąć podnózek w dół; zatrzyma się po zwolnieniu przycisku.

4.Regulacja podnoszenia/opuszczania podnóżka


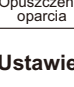
Przycisk	Opis
 Podnoszenie podnóżka	Przycisk podnoszenia podnóżka: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli podnieść podnózek i zwolnij go, aby zatrzymać podnoszenie; po zakończeniu podnoszenia, moduł automatycznie wykryje długość stopy.
 Opuszczanie podnóżka	Przycisk opuszczania podnóżka: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli opuścić podnózek i zwolnij go, aby zatrzymać opuszczanie; po zakończeniu opuszczania, moduł automatycznie wykryje długość stopy.

5.Regulacja pozycji fotela

Przycisk	Opis
 Podnieść całość	Przycisk Podnieść całość: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli podnieść oparcie i jednocześnie powoli obniżyć podnózek, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać podnoszenie oparcia lub opuszczanie podnóżka; po zakończeniu podnoszenia, podnózek automatycznie wykryje wzrost.
 Opuść całość	Przycisk Opuść całość: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli opuścić oparcie i jednocześnie powoli podnieść podnózek, a następnie zwolnij go, aby zatrzymać opuszczanie oparcia lub podnoszenie podnóżka; po zakończeniu opuszczania łączonego, podnózek automatycznie wykryje wzrost.


Instrukcja obsługi

6.Regulacja oparcia

Przycisk	Opis
 Podnoszenie oparcia	Do góry: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli podnieść oparcie i zwolnij go, aby zatrzymać podnoszenie.
 Opuszczenie oparcia	W dół: naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby powoli opuścić oparcie i zwolnij go, aby zatrzymać opuszczanie.


VI.Ustawienia (Używaj tej funkcji dopiero po włączeniu urządzenia)

- 1.Kliknij przycisk "Ustawienia" na pasku menu po lewej stronie ekranu, aby rozwinąć panel ustawień, możesz zobaczyć numer seryjny urządzenia, numer wersji oprogramowania, kod ID i wersję systemu. To menu umożliwia wybór języka.
- 2.Model urządzenia, wersja oprogramowania, numer seryjny urządzenia i wersja systemu operacyjnego przedstawiają informacje o danym urządzeniu.
- 3.Bluetooth (Instrukcja obsługi głośnika Bluetooth) Kliknij ikonkę Bluetooth, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Po sparowaniu i połączeniu urządzenia źródłowego z funkcją Bluetooth (np. telefon komórkowy, tablet MID itp.) z modułem Bluetooth fotela do masażu, muzyka odtwarzana przez urządzenie źródłowe może być bezprzewodowo przesyłana przez Bluetooth do systemu audio fotela do masażu w celu słuchania muzyki podczas sesji. Wejdź do menu głównego urządzenia smart. Otwórz "Ustawienia" i wybierz opcję "Bluetooth". Otwórz "Bluetooth", a urządzenie automatycznie "Search for a New Bluetooth Device" (Wyszuka nowe urządzenie Bluetooth). Urządzenie smart odnajdzie odpowiednie połączenie (np. IMCM-XXXX). Kliknij przycisk „Połącz”. Jeżeli pojawi się pytanie, czy sparować z urządzeniem, wystarczy wybrać „Sparuj”, aby zakończyć parowanie. Włącz "Muzyka" w urządzeniu smart i wybierz utwór do odsłuchu.

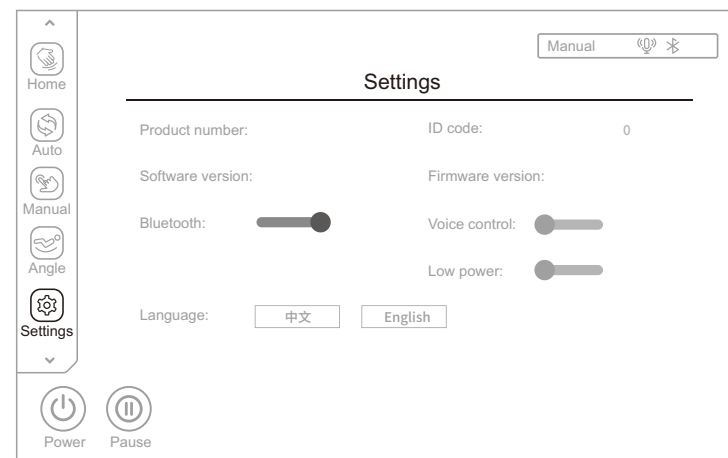

Instrukcja obsługi

3. Sterowanie głosowe: Kliknij przełącznik Sterowanie głosowe, aby włączyć/wyłączyć funkcję Sterowanie głosowe. Po włączeniu funkcji głosowej można sterować fotelem masującym za pomocą komend głosowych, listę z komendami głosowymi znajdziesz na następnej stronie.

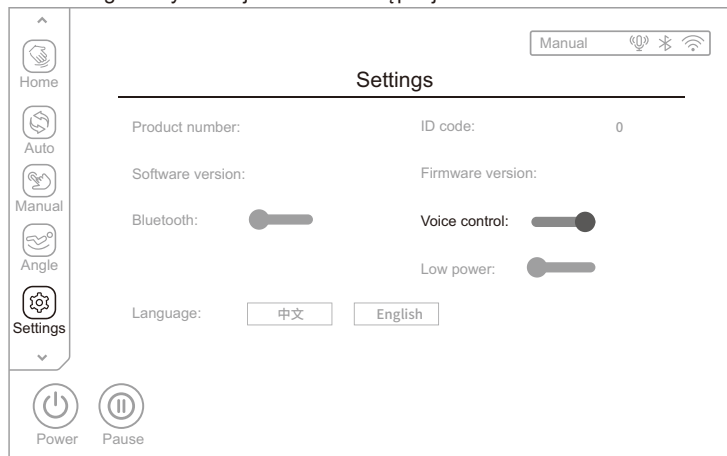

(1) Fotel masujący jest włączony, należy potwierdzić, czy funkcja sterowania głosowego jest uruchomiona (jeśli nie, przejdź do interfejsu ustawień, aby ją najpierw włączyć); Gdy sterowanie głosowe jest włączone, możesz nacisnąć „Sterowanie głosowe” na pilocie lub powiedzieć „Hi Alice” lub „Hey Alice” w stronę głośnika aby uruchomić asystenta głosowego. Gdy asystent głosowy odpowie „I am here”, oznacza to, że można za pomocą funkcji asystenta sterowania głosowego sterować fotelem masującym.

(2) Możesz także nacisnąć przycisk „Sterowanie głosowe” na panelu szybkiego wyboru w podłokietniku, aby obudzić asystenta głosowego, a następnie przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy, aby go włączyć lub wyłączyć.

(3) Po przebudzeniu asystenta głosowego wypowiedz polecenie w ciągu 6 sekund, aby uruchomić funkcję sterowania fotelem masującym. Gdy asystent głosowy odpowie na polecenie, możesz kontynuować wypowiadanie polecenia. Odstęp pomiędzy dwoma sąsiednimi poleceniami nie może przekraczać 6 sekund, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne wybudzenie asystenta głosowego. Szczegółowa tabela poleceń głosowych wygląda następująco:

Uwaga: Podczas używania funkcji sterowania głosowego prędkość mówienia nie powinna być zbyt duża, a polecenia głosowe powinny być wydawane zgodnie z wpisem sterowania głosowego.

Instrukcja obsługi


Sterowanie głosem		
Komenda: “Hi Alice” lub “Hey Alice”. Odpowiedź: I am here.		
Nr	Komenda	Odpowiedź
1	Massage on	Odpowiedź: Ok, Massage on
2	Massage close	Odpowiedź: Ok, Massage close
3	Total Relax	Odpowiedź: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Odpowiedź: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Odpowiedź: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Odpowiedź: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Odpowiedź: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Odpowiedź: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Odpowiedź: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Odpowiedź: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Odpowiedź: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Odpowiedź: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Odpowiedź: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Odpowiedź: Ok, Go little down
15	Go little up	Odpowiedź: Ok, Go little up

Uwaga: polecenia 14 i 15 mogą być używane tylko po poleceniu 13.

Instrukcja obsługi


4.Przełączanie na tryb oszczędzania energii:

Włączony tryb niskiego zużycia energii: w stanie niskiego zużycia energii nie można używać klawiszy skrótów w podłokietniku ani funkcji sterowania głosowego; należy ich używać w stanie włączonego zasilania. Tryb niskiego zużycia energii wyłączony: klawisze skrótów w podłokietniku oraz sterowania głosem może być używana także w stanie czuwania.

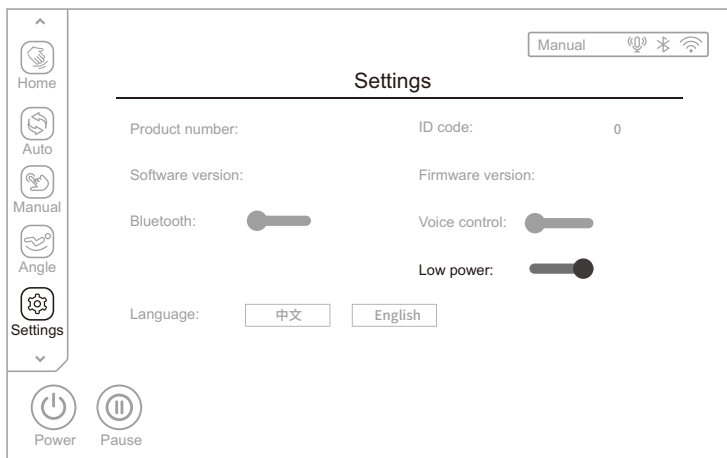

5.Wybór języka


Domyślnym językiem jest angielski. Polski i Chiński są opcjonalne.

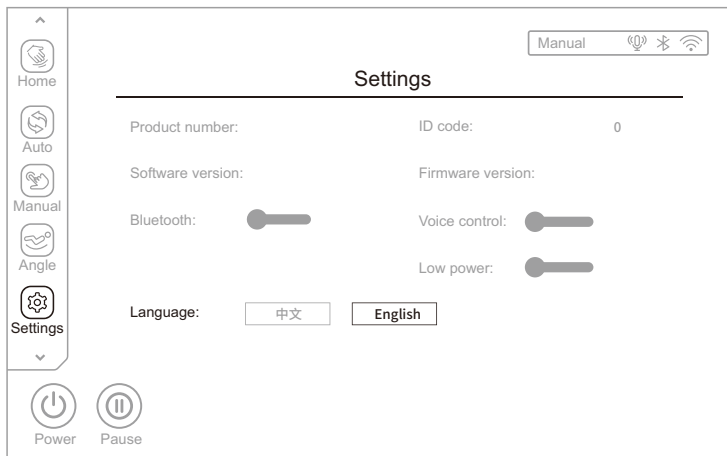


Instrukcja obsługi

VII.Wykrywanie stanu zdrowia (możesz użyć tej funkcji dopiero po włączeniu urządzenia)

1.Rozpoczniesz sprawdzanie stanu zdrowia Kliknij przycisk „Zdrowie” na pasku menu po lewej stronie ekranu, aby przejść do ekranu wykrywania stanu zdrowia, naciśnij przycisk Rozpocznij wykrywanie stanu, aby rozpocząć skanowanie a następnie delikatnie połóż palec wskazujący lub środkowy na czujnik. Po kilku sekundach zostaną wyświetlone aktualne dane dotyczące tętna, poziomu saturacji (ilość tlenu we krwi) i mikrokrążenia, czekaj na zakończenie procesu.

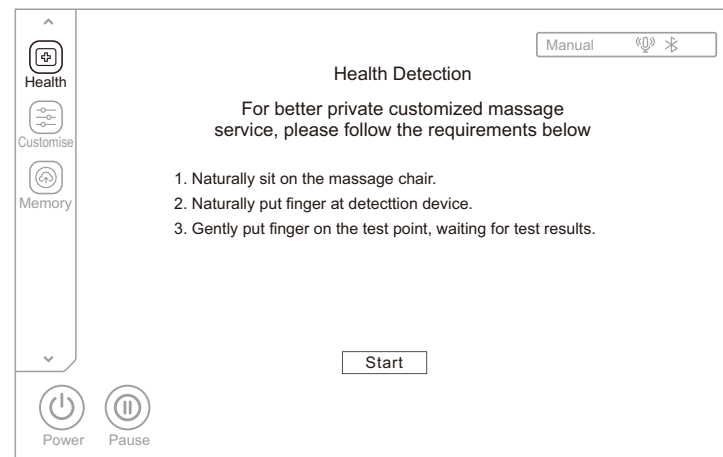


Wykrywanie zdrowia

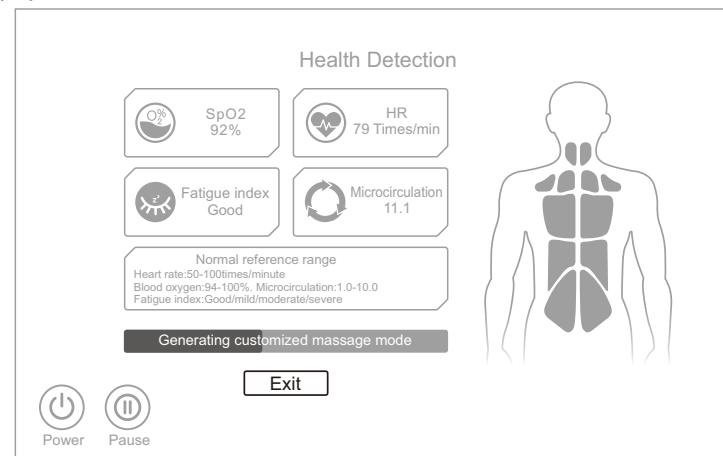

Instrukcja obsługi

2.Rekomendowany program

Po zakończeniu skanowania stanu zdrowia na ekranie wyświetli się odpowiednio tętno, saturacja i poziom zmęczenia. Saturacja oznacza stężenie tlenu we krwi, zwykle waha się od 95% do 99%. Poziomy zmęczenia określony jest w jednym z czterech poziomów: wypoczęty, łagodny, umiarkowany i silny. Na podstawie Twojego poziomu zmęczenia zostanie Tobie zalecony program automatyczny. Wybierz opcję „Tak”, aby rozpocząć korzystanie z zalecanego programu, lub opcję „Nie”, aby powrócić do rodzaju masażu sprzed wykrycia stanu zdrowia.

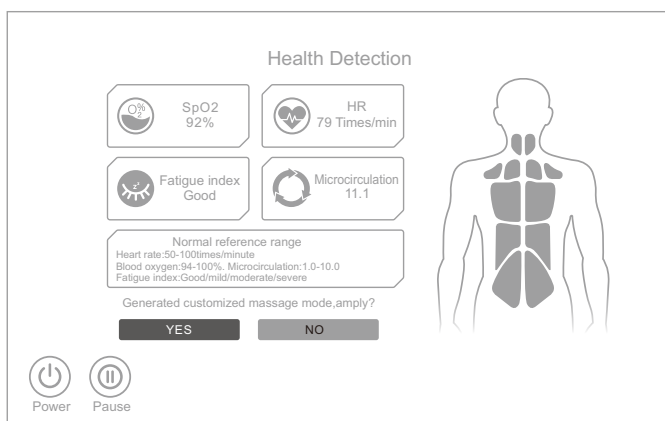

3.Nie wykryto prawidłowych danych.


Jeśli nie zostaną poprawnie wykryte dane, Użytkownik zostanie poproszony o ponowne wykrycie. Wybierz „Tak”, aby ponownie uruchomić wykrywanie stanu zdrowia, lub „Nie”, aby zakończyć wykrywanie i powrócić do masażu sprzed wykrycia stanu zdrowia.



Instrukcja obsługi


4.Zakończ wykrywanie stanu zdrowia.

Podczas wykrywania stanu zdrowia naciśnij klawisz Wyjdź, aby zakończyć wykrywanie i powrócić do masażu sprzed wykrycia stanu zdrowia.

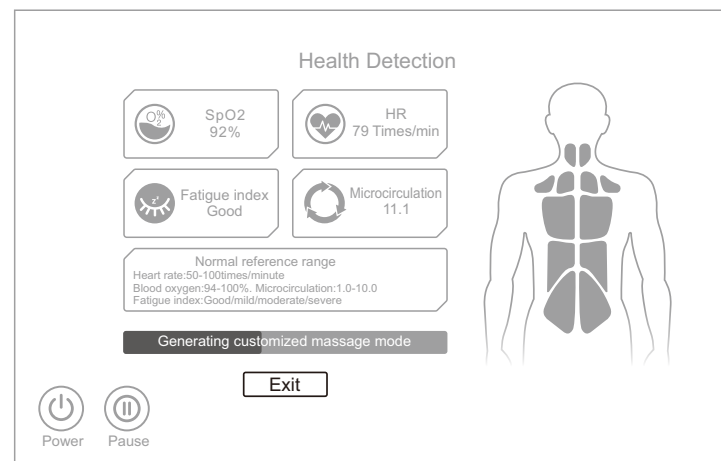

VIII.Ustawienia osobiste (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)


Kliknij przycisk „Osobiste” na pasku menu po lewej stronie wyświetlacza, aby wejść do menu ustawień osobistych i wybierz opcję Użytkownik I lub Użytkownik II (tylko jeśli odpowiednie ustawienia zostały wcześniej ustawione i zapisane) dla masażu.

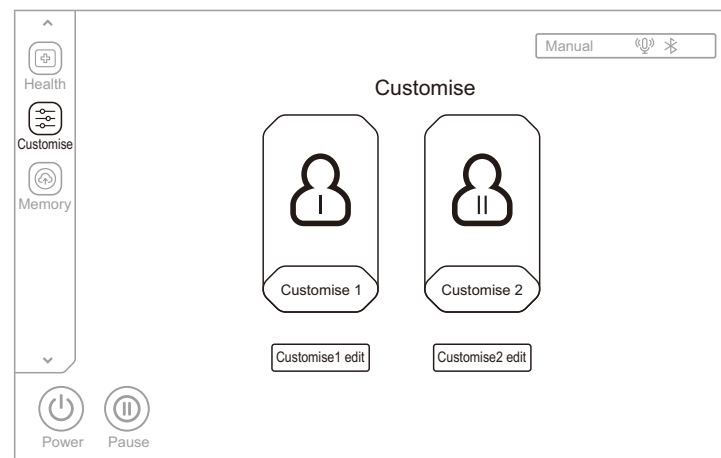

Schemat Ustawień osobistych

Instrukcja obsługi


Wybierz opcję Użytkownik 1 ustawienia lub Użytkownik 2 ustawienia, aby wejść do menu ustawień osobistych, następnie wybierz preferowaną technikę masażu, której ikona zostanie podświetlona po dokonaniu wyboru, a także wybierz czas masażu, intensywność 4D, masaż poduszkami powietrznymi, szerokość masażu, szybkość masażu, intensywność masażu poduszkami powietrznymi, odgrzewanie, ugniatanie łydek i inne funkcje, a następnie kliknij Zapisz, aby zapisać bieżące ustawienia jako Użytkownik 1 lub Użytkownik 2. Po pomyślnym zapisaniu ustawień Użytkownika, program będzie natychmiast dostępny i będzie można go wykorzystać do kolejnego masażu, klikając zapisane ustawienia osobiste.

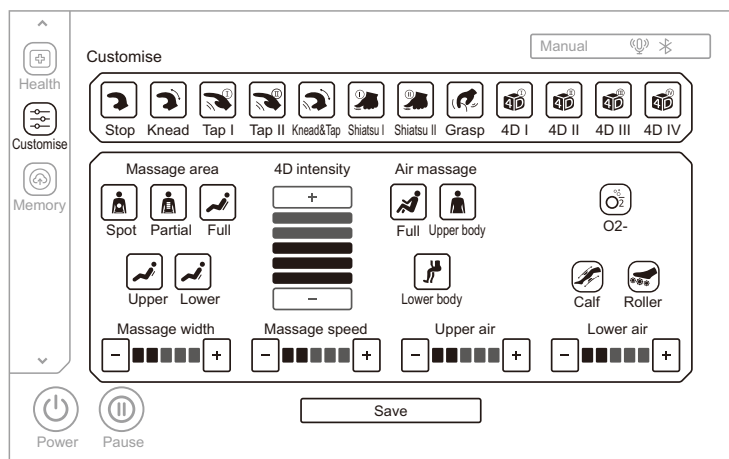

Instrukcja obsługi

IX. Pamięć (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

Kliknij przycisk „Pamięć” na pasku menu po lewej stronie wyświetlacza, aby wejść do menu wyboru pamięci funkcji masażu, z dwiema kategoriami, w tym zachowaniem funkcji masażu i wczytywaniem funkcji masażu. Zachowane: Zachowane I, Zachowane II i Zachowane III. Wybierz masaż: Wybierz I, Wybierz II i Wybierz III.

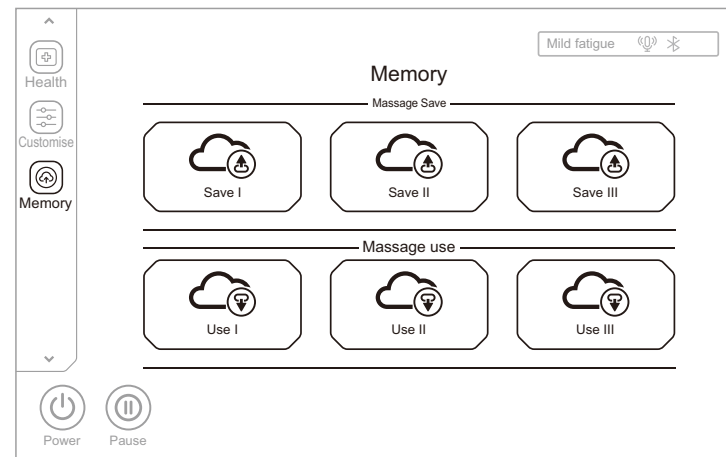


Przycisk	Opis
	Zachowane: Zapisywanie aktualnie uruchomionego programu masażu, w tym programu automatycznego, techniki masażu, ustawienia poduszek powietrznych i intensywności, pozycji i kąta odchylenia podnóżka i oparcia oraz innych funkcji masażu.
	Wczytywanie: Wywołanie zapisanego wcześniej programu masażu, w tym programu automatycznego, techniki masażu, ustawienia poduszek powietrznych i intensywności, pozycji i kąta odchylenia podnóżka i oparcia oraz innych funkcji masażu.


Instrukcja obsługi

X. Pozostałe funkcje (możesz korzystać z tej funkcji po włączeniu fotela)

W menu „Ekran główny” wybierz przycisk „Ogrzewanie- kolanierz”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję odgrzewania w kolanierzu (w przypadku ogrzewania grafenem). Po włączeniu funkcji grzania na 3 minuty poczujesz ciepło”.

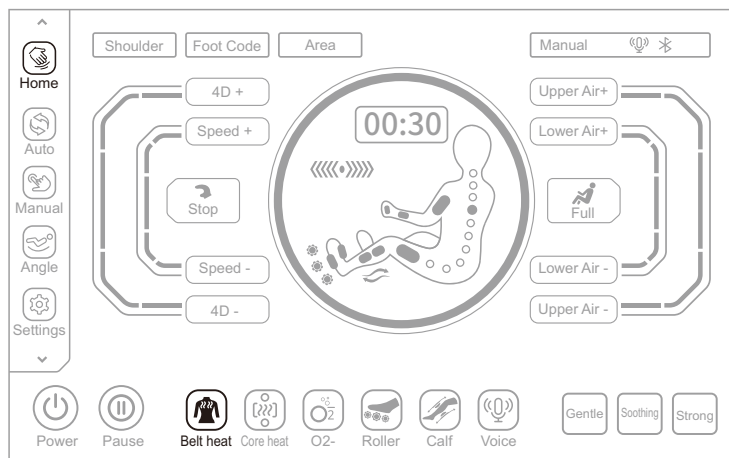


W menu „Ekran główny” wybierz przycisk „Ogrzewanie”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję mechanicznego ogrzewania rdzenia (ogrzewanie jadeitem). Po włączeniu funkcji grzania na 3 minuty, poczujesz ciepło.

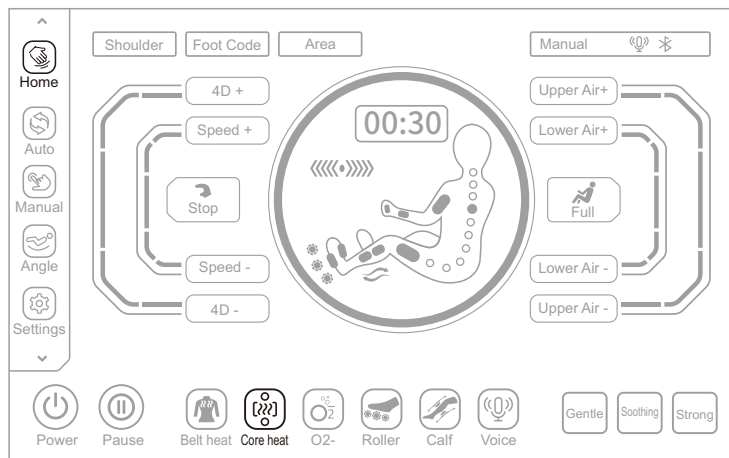


Instrukcja obsługi

W menu „Ekran główny” wybierz przycisk „O2-Ion”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizacji powietrza.

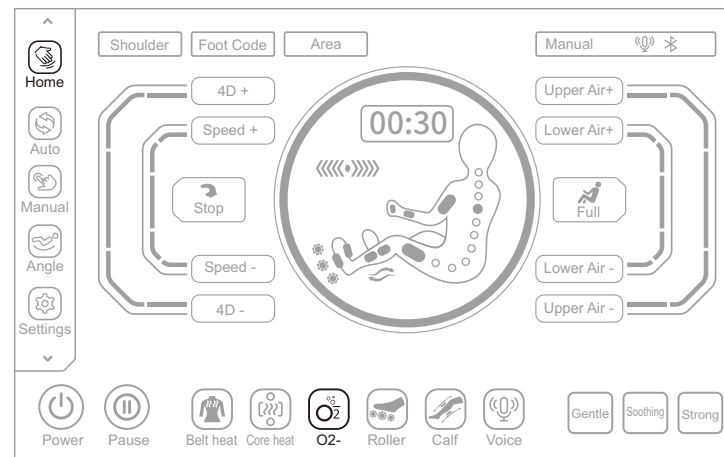


W menu „Ekran główny” kliknij przycisk „Rolki”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu rolkowego stóp z trzema regulowanymi szybkościami. Kliknij raz, żeby rozpocząć masaż rolkowy na 1 poziomie szybkości, klikając drugi raz zwiększysz poziom szybkość masażu do poziomu 2, klikając kolejny raz wejdiesz na poziom 3- najszybszy. Kliknięcie po raz czwarty, wyłączy rolki masujące w stopach. Ten przycisk działa powtarzalnie.

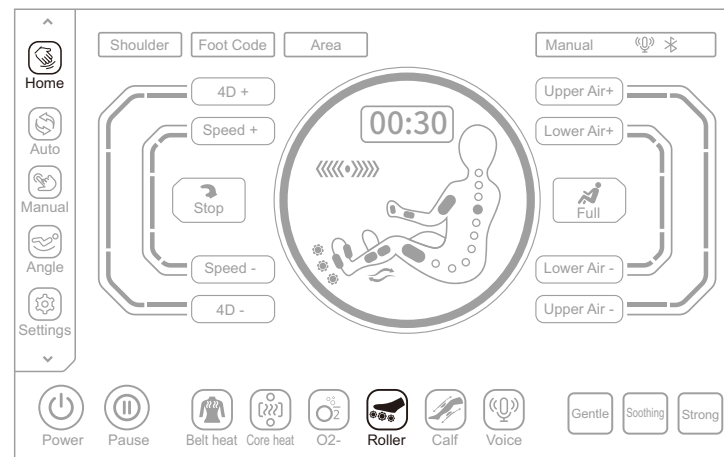


Instrukcja obsługi

Na ekranie głównym kliknij przycisk masażu łydek "Łydki", aby włączyć lub wyłączyć funkcję masażu ugniatającego łydki; po wewnętrznej i zewnętrznej stronie łydki znajdują się systemy masażu ugniatającego i ściskającego poduszkami powietrznymi, które mogą złagodzić sztywność lub napięcie mięśni łydek spowodowane długotrwałym stanem.

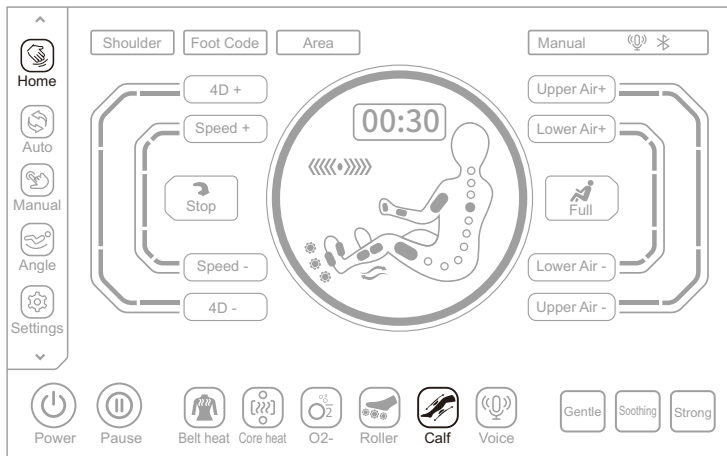


W zakładce "Asystent głosowy" wybierz "Sterowanie głosowe" przycisk, żeby włączyć sterowanie głosem

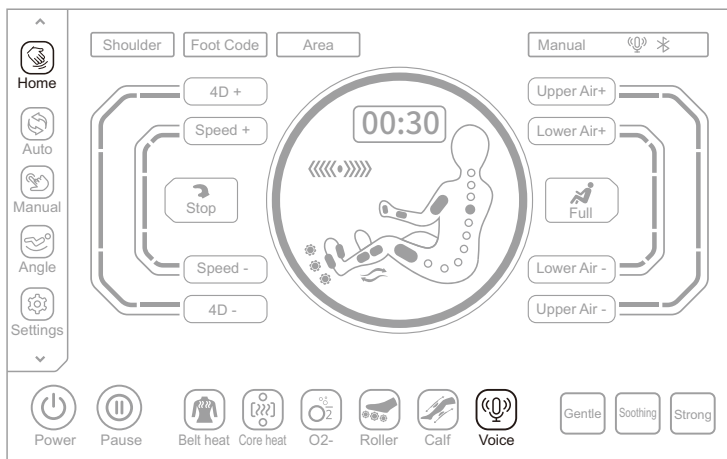


Instrukcja obsługi

W menu "Ekran główny" wybierz przycisk "Regulacja pozycji ramion", a następnie naciskaj przyciski strzałek w górę i w dół w wyskakującym menu, aby dostosować pozycję ramion (11 poziomów regulacji).

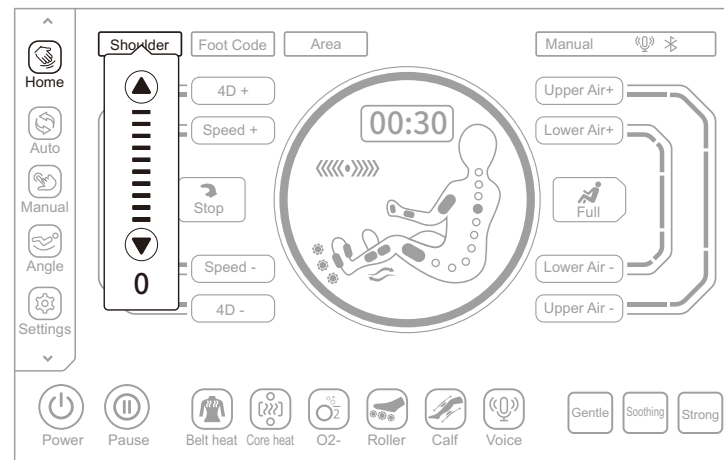


W menu "Ekran główny" naciśnij przycisk "Rozmiar stopy" i wybierz odpowiedni rozmiar stopy z rozwijalnego menu.

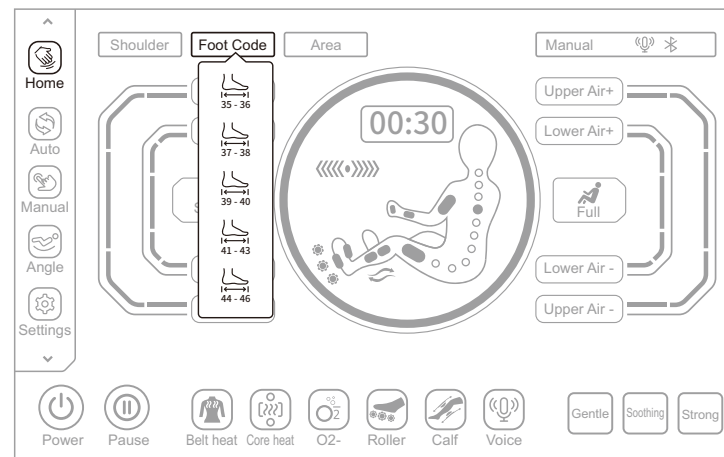


Instrukcja obsługi


W menu "Ekran główny" wybierz przycisk „Czas masażu”, naciśnij przycisk strzałki plus i minus w wyskakującym menu, możesz zwiększyć lub zmniejszyć czas masażu. Kliknij „+”, czas zwiększy się o 5 minut, maksymalnie możesz wydłużyć czas do 40 minut. Kliknij przycisk „-”, czas zmniejszy się o 5 minut.

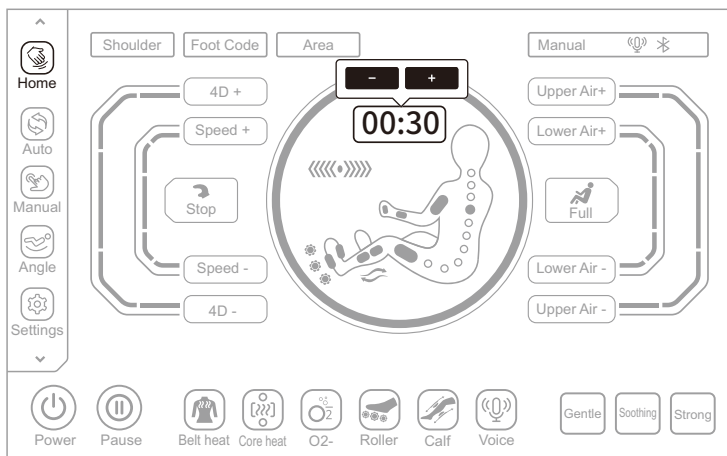

W menu "Ekran główny" wybierz przycisk „Delikatny, komfortowy, lub mocny, aby wybrać odpowiednią intensywność masażu.

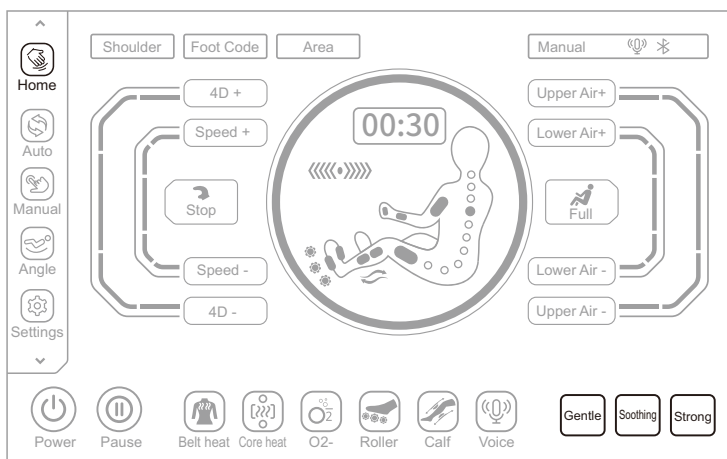

Instrukcja obsługi

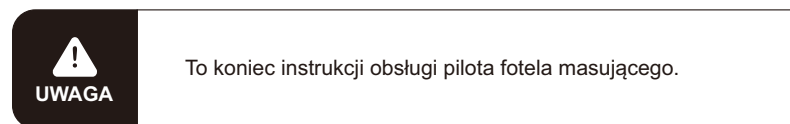

XI. Pobierz i zainstaluj aplikację Bluetooth

1. Pobieranie i instalacja aplikacji

(1) Metoda pobierania systemu Android: Wyszukaj wersję do pobrania "Robot Masaż" w Google Play (Google Store) pobierz i zainstaluj. Możesz także zeskanować poniższy kod QR, aby go pobrać i zainstalować. Po udanej instalacji możesz używać aplikacji Bluetooth do obsługi fotela masującego.

(2) Metoda pobierania systemu Apple: Wyszukaj i pobierz wersję IOS "Robot Massage" w App Store (Apple App Store), aby ją pobrać i zainstalować. Możesz także zeskanować poniższy kod QR, aby go pobrać i zainstalować. Po udanej instalacji możesz używać aplikacji Bluetooth do obsługi fotela masującego.



Robot Massage



Android QR Code




ISO QR Code

XII. Połączenie aplikacji

1. Podłączenie fotela masującego z aplikacją


(1) Wybierz "ustawienia" i kliknij Device Connection (Połączenie urządzenia)

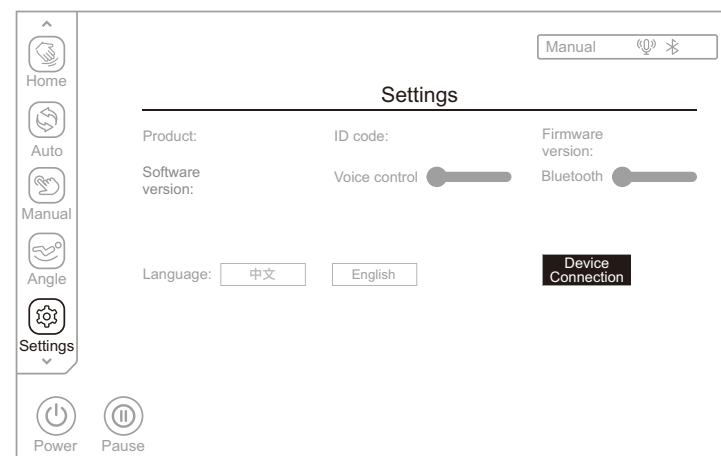

Instrukcja obsługi


(2) Aplikacja automatycznie wyszuka odpowiedni numer urządzenia (np. IMCM-XXXX), kliknij odpowiedni numer urządzenia (wyświetli się połączenie), aby nawiązać połączenie.

(3) Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz obsługiwać fotel masujący.

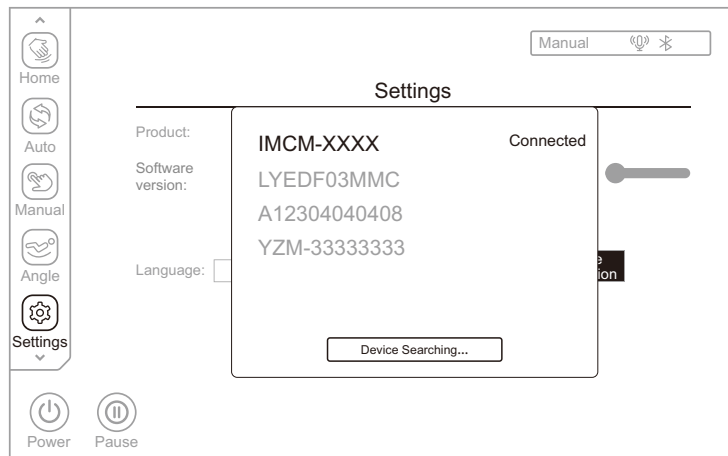


XIII. Struktura obsługi aplikacji Bluetooth

1. Naciśnij przycisk „Wł./Wył.”, rozpocznij masaż.

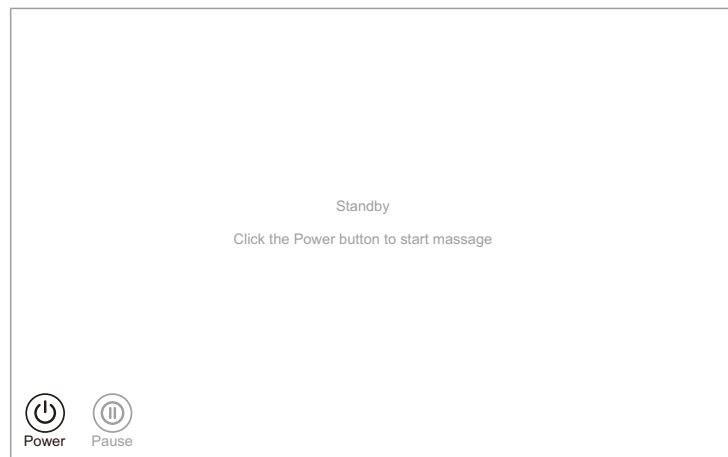

Instrukcja obsługi

2. Po włączeniu fotela, przejdź do ekranu głównego, aby wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj masażu.

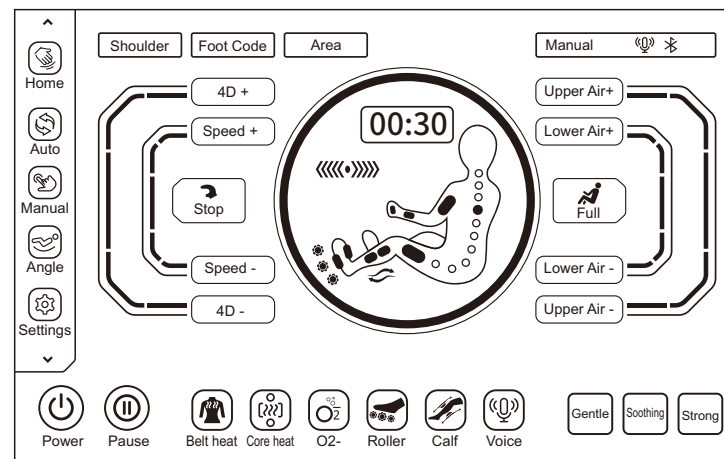


UWAGA

Instrukcje obsługi interfejsu aplikacji Bluetooth fotela masującego można znaleźć w instrukcji na stronach 17–50 instrukcji obsługi pilota.

Instrukcja obsługi


XIV.Zakończenie masażu

Podczas masażu naciśnij Wł./Wył. na pilocie lub w prawym podłokietniku, aby wyłączyć urządzenie. Natychmiast wyłączone zostaną wszystkie funkcje masażu, a oparcie i podnóżek zostaną ustawione w pozycji wyjściowej. Gdy upłynie czas masażu, wszystkie funkcje masażu zostaną automatycznie wyłączone, przy czym oparcie i podnóżek zostaną w pozycji rozłożonej.

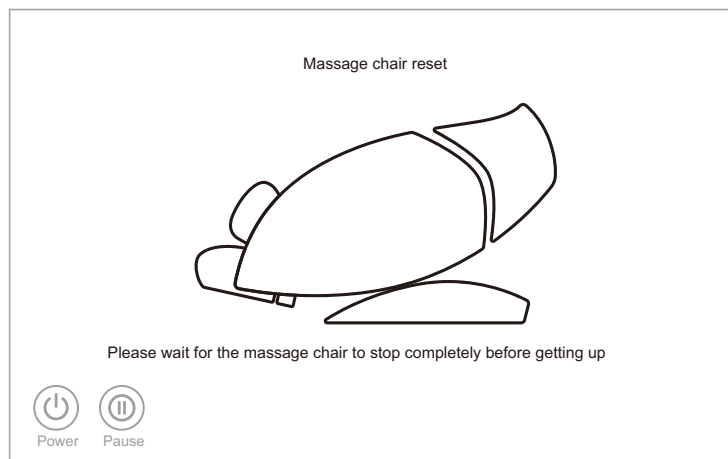


Odłącz zasilanie całego urządzenia, jak pokazano na rysunku (Schemat pozycji przełącznika zasilania urządzenia).


Przełącz przełącznik zasilania (pozycja "0")

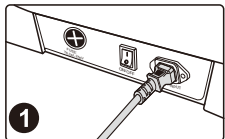

Schemat wyciągania wtyczki zasilania

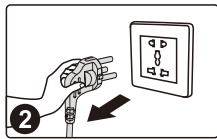

Wyjmij przewód zasilający urządzenie

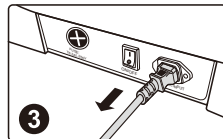

Czyszczenie i konserwacja

Cleaning synthetic leather and plastic parts

Czyszczenie skóry syntetycznej i elementów plastikowych

Przetrzyj skórę miękką, suchą szmatką

- Nie używaj do czyszczenia urządzenia środków chemicznych, takich jak rozcieńczalnik, benzyna, alkohol itp.
- Używając dostępnych w sprzedaży środków do pielęgnacji skóry, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
- Jeśli skóra syntetyczna jest szczególnie brudna, wytrzyj ją w następujący sposób:
 1. Zanurz miękką szmatkę w wodzie lub ciepłej wodzie z dodatkiem 3% do 5% neutralnego detergentu, a następnie dokładnie ją odciśnij.
 2. Użyj miękkiej ściereczki do wytarcia powierzchni skóry.
 3. Wytrzyj roztwór czyszczący szmatką namoczoną w czystej wodzie i dokładnie wyciśniętą.
 4. Przetrzyj miękką ściereczką.
 5. Pozostaw do swobodnego wyschnięcia.
- Jeśli trudno jest usunąć plamy, zanurz dostępną w sprzedaży gąbkę z melaminy w neutralnym detergencie, a następnie wytrzyj nią urządzenie.
- Nie używaj suszarki do włosów do suszenia powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzeń w dżinsach i tkaninach kolorowych, ponieważ kolor tkaniny może zabarwić powierzchnię skóry syntetycznej.
- Nie utrzymuj tych części w kontakcie z tworzywem sztucznym przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje to zabrudzenie powierzchni skóry syntetycznej.
- Syntetyczna skóra może się odbarwić, dlatego po użyciu np. farby do włosów przykryj część dotkniętą przez włosy ręcznikiem.



Rozwiązywanie problemów

Problem	Kiedy podnózek lub oparcie osiągną określoną pozycję, naciskasz odpowiedni przycisk regulacji, ale nie następuje żadna zmiana i emitowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
Rozwiązanie	Ze względu na konstrukcję fotela i wymagania ergonomiczne, fotel ma ograniczenie ochronne dla max stanu regulacji położenia. Po osiągnięciu granicy pojawi się dźwięk przypominający.
Problem	Funkcja nie działa lub niektóre funkcje nie działają po włączeniu fotela.
Rozwiązanie	Po włączeniu fotela przez naciśnięcie przycisku włącznika należy ręcznie wybrać automatyczny program masażu lub inny tryb pracy. Jeśli fotel nie będzie działał, wyłączy się automatycznie po 20 minutach. Jeśli wybrano tryb programu manualnego, funkcje, które nie zostały wybrane, mogą zostać wyłączone, a tryb pracy należy ustawić ręcznie w trybie manualnym.
Problem	Podczas regulacji pozycji fotela słychać odgłos tarcia skóry.
Solution	W tym fotelu zastosowano wysokiej jakości skórę odporną na zużycie, która spełnia wymogi ochrony środowiska. Ze względu na właściwości materiałów skórzanych podczas tarcia przy ruchu względnym będzie występował słyszalny odgłos, co jest zjawiskiem normalnym. Uwaga: Jeśli podczas pracy fotela usłyszysz dźwięk rozrywania tkaniny lub skóry, natychmiast przestań z niego korzystać i zwróć się do profesjonalnego serwisu.
Problem	Ramiona masujące nie docierają do barków i karku.
Solution	Jeśli głowa nie dotyka poduszki za głową lub plecy nie dotykają oparcia, pozycja ramion może być niższa niż rzeczywista pozycja podczas procesu skanowania sylwetki. Usiądź w najgłębszej pozycji siedzenia, oprzyj głowę na zagłówku i zacznij skanowanie od początku.
Problem	Fotel jest uszkodzony. Przewód zasilający lub wtyczka są nienaturalnie gorące.
Solution	Aby zapobiec wypadkom, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących urządzenia, skontaktuj się z wyznaczonym serwisem.

Specyfikacja produktu

Model: A801 iRest MAESTHRON

Konfiguracja: 2

Nazwa: Fotel masujący

Napięcie znamionowe: 110-120 V ~ 60 Hz
220-240 V ~ 50 Hz/60 Hz

Moc znamionowa: 220 W

Czas znamionowy: 20 min

Klasa bezpieczeństwa: Klasa I